



Serenity Choice™ Music

来自听力保健专家的高端听力保护



瑞士Sonova集团旗下品牌

PHONAK
life is on



音乐会上的音乐音量通常超过 85 dB 的安全限度，超过这个限度的声级会导致听力损伤，无论是耳鸣、耳聋还是长期听力损失。Serenity Choice™ Music 可将音量降低 17 dB，可以安全收听长达八小时的高达 102 dB 的音乐。

Serenity Choice™ Music 专为音乐家、音乐爱好者和音乐会爱好者设计。专利薄膜滤波器技术提供了经调谐、平坦型衰减响应，因此所有的频率减少水平几乎一致，这非常适用于倾听音乐，因为聆听者不会丧失任何原声，而只是降低到一个安全的水平，这也让 Serenity Choice™ Music 成为音乐市场上最好的高保真通用耳塞。

Serenity Choice™ Music 为耳朵保持了一个开放的空气通道，从而在保持耳朵通气性的同时，最大限度地减少堵塞的影响（低频强调），以达到最舒适的状态。Serenity Choice™ Music 主要用于音乐用途，但同样适用于任何噪声环境的耳朵保护。

产品特点一览

- 保证完美佩戴：套装中有小号、中号和大号耳塞提供，特大号可根据要求提供。
- 卫生：滤声器采用先进的网状技术，保证耳朵始终通气良好。
- 低过敏性：耳塞由医用级 TPE 制成。
- 性价比高：耳塞可多次使用。
- 自然度：自然听觉得以保留，这有助于情景感知。

17 | 10
SNR | NRR

声音降低:

环境声音:

产品用途

- 在安全的听力级别享受音乐
- 在音乐会、俱乐部、酒吧等场合帮助防止听力损伤
- 极端舒适
- 最低堵耳效应

装箱单

- 三种尺寸 (S、M、L) 各有 2 个耳塞
- 两个 17 dB 滤声器
- 铝钥匙圈便携包
- 多语种手册

认证数据 Serenity Choice™ Music (KM 20)

CE	125 (Hz)	250 (Hz)	500 (Hz)	1 (kHz)	2 (kHz)	4 (kHz)	8 (kHz)	H	M	L	SNR
平均值衰减 (dB)	23.6	22.8	22.7	25.8	22.8	15.8	17.4				
标准差 (dB)	4.6	5.9	5.3	4.6	5.2	2.6	3.6	15	18	18	17
APV 95% (dB)	19.0	16.9	17.4	21.2	17.6	13.2	13.8				

ANSI	125 (Hz)	250 (Hz)	500 (Hz)	1 (kHz)	2 (kHz)	3.15 (kHz)	4 (kHz)	6.3 (kHz)	8 (kHz)	NRR
平均值衰减 (dB)	23.8	21.6	21.6	25.8	24.7	15.9	15.6	17.1	13.5	
标准差 (dB)	2.6	3.2	2.9	4.8	3.9	2.6	3.2	3.0	4.4	10
APV 98% (dB)	18.6	15.2	15.8	16.2	16.9	-	10.0	-	7.9	

