

# Vedlikeholdsguide for ladere



# Tips for å holde laderen i god stand

## 1. Sjekk laderen jevnlig

- Sjekk ladekontaktene for uregelmessigheter eller skitt.
- Hold laderen ren og fri for støv.

## 2. Oppbevar laderen riktig

- Hold laderen på et tørt og rent sted, som en kommode eller et nattbord.
- Unngå fuktige steder som bad eller kjøkken.
- Beskytt laderen mot varme – ikke plasser den i direkte sollys eller i en varm bil.
- Du kan med fordel lukke lokket på laderen, både når du lader og ved oppbevaring av apparatet.

## 3. Rengjør laderen forsiktig

- Bruk en myk, tørr lofri klut for å tørke av laderen.
- Ikke bruk vann, rengjøringsmidler eller løsemidler.

## 4. Lad riktig

- Bruk alltid den medfølgende strømforsyningen og ladekabelen som følger med laderen.

## 5. Langtidsoppbevaring

- Hvis du ikke skal bruke høreapparatet på en stund, bør du oppbevare det i en eske med en tørketablett eller på et godt ventilert sted. Dette gjør at fuktighet kan fordampe fra høreapparatet og forhindrer potensiell innvirkning på ytelsen.

Ved å følge disse enkle rådene, sørger du for at laderen til ditt oppladbare høreapparat holder seg i god stand og varer lenger.