


Vedlikeholdsguide for BTE-høreapparater



Rengjøring og vedlikehold

Det er viktig å rengjøre og vedlikeholde ditt høreapparat. En fast rutine på vedlikehold vil sikre at høreapparatet holder seg i god stand de årene du har høreapparatet.

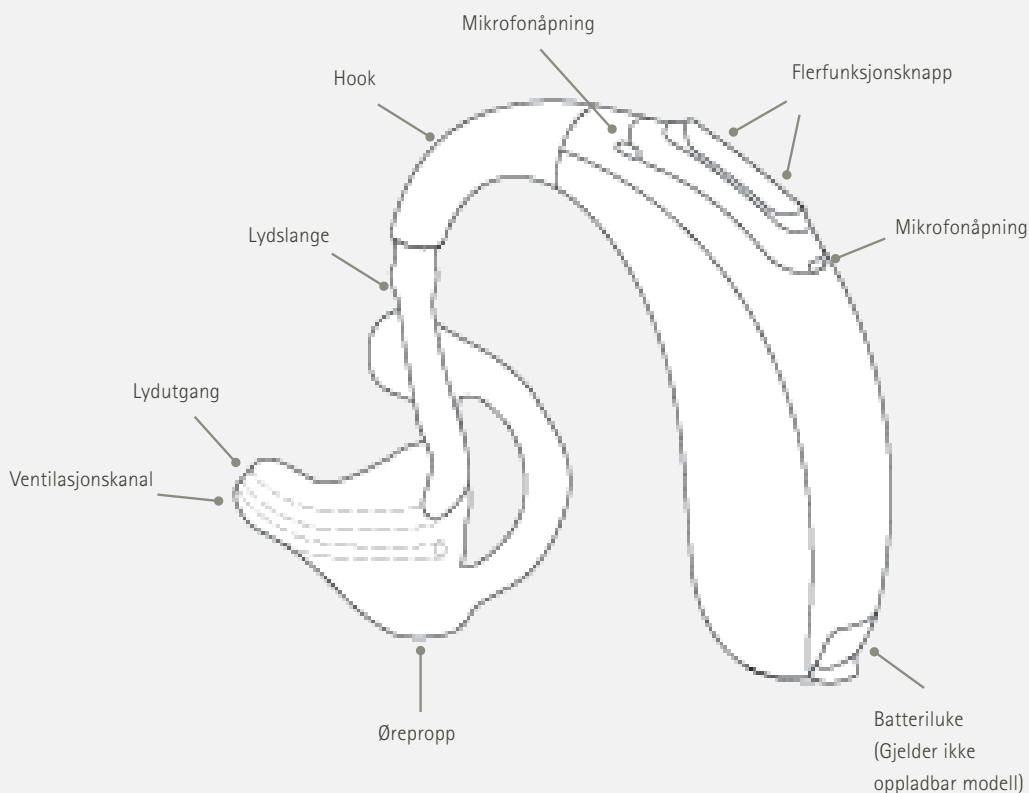

Ulike deler

Tykkslange

Tykkslangen går mellom høreapparatet og øreproppen og må skiftes jevnlig. Etter en tids bruk vil tykkslangen bli stiv, hard og krympe. Når den har stivnet, blir det vanskeligere å bytte slangen. Tykkslangen leveres i en lengde på 50 cm og klippes til ønsket lengde med en saks. Vi anbefaler å skifte tykkslange hver tredje måned.

Tubelock-slange

Tubelock-slangen har en festering som presses inn i øreproppen og brukes primært på myke ørepropper. For å bytte slange må den gamle slangen trekkes ut av øreproppen. Den nye tubelock-slangen settes inn og trekkes gjennom øreproppen til festeringen sitter godt på plass.

Klipp av slangen som stikker ut av øreproppen, og tilpass lengden slik at den passer til høreapparatet.

Hook

Hooken er bøylene med filter som festes på høreapparatet og bør skiftes ved fukt, brudd eller skade. Det sitter et filter i hooken som kan svulle ved kontakt med fukt. Hvis dette skjer, kan høreapparatet bli stumt. Dersom hooken ikke har filter, kan du bruke en proppeblåser til å fjerne fukt eller kondens.

EH-bend

EH-bend er festebøylene som kobler øreproppen til slangen. Ved skade eller slitasje kan den skiftes ut. Vær oppmerksom på at ikke alle ørepropper har EH-bend; noen har en fast-montert festebøyle. Hvis du er usikker på hvilken type du har, kontakt din klinikk eller høre-sentral.



Tubelock



Hook



EH-bend

Rutiner

Ukentlig rutine

Undersøk om det har samlet seg ørevoks på øreproppen. Ørevoks kan blokkere lydkanalen og hindre lyden i å slippe ut fra høreapparatet. Sørg for at både ventilasjonshull og lydkanal holdes åpne.

Rengjør øreproppen med en myk klut som er lett fuktet.

Rengjør overflatene på høreapparatet med en lofri, myk klut, eller bruk en rengjøringsklut spesielt beregnet for høreapparater.

OBS! Ikke bruk vann, såpe eller rengjøringsmidler på høreapparatet.

Månedlig rutine

Sjekk at det ikke har samlet seg smuss i mikrofonåpningene på høreapparatet. Bruk en passende børste for å fjerne smuss. Mikrofonåpningene er de små hullene over og under bryteren på høreapparatet.

Grundig rengjøring av ørepropp og bytte av tykkslange. Den støpte øreproppen bør tas av og vaskes jevnlig. Bruk et mildt rengjøringsmiddel eller rengjørings-tabletter laget spesielt for ørepropper.

Generiske propper produseres ikke av Phonak. For renseverktøy spesielt laget for dine propper, ta kontakt med din proppeleverandør.

Nyttige renseverktøy inkluderer proppeblåser og børste. Proppeblåseren brukes til å blåse gjennom ventilasjonskanal og lydkanal på støpte propper. Børsten kan brukes til å rengjøre mikrofonåpningene og andre steder der smuss kan samle seg, for eksempel rundt bryteren..



Børstesett



Proppeblåser

Fuktproblematikk

Fukt kan samle seg i øreproppen og i mikrofonene på høreapparatet. Da kan høreapparatet bli stumt. Dette kan være et problem, spesielt om sommeren når man svetter mer, eller hvis man er mye ute i all slags vær. For å unngå dette er det lurt å bruke en tørkeboks og/eller tørketabletter for å holde høreapparatet tørt.

OBS! Noen oppladbare høreapparat har tilhørende lader med plass til tørketablett.



Tørkeboks




Tørketablett

Beskrivelse av bruk:

- Ta en tørketablett ut av pakken og legg i bunnen av tørkeboksen.
For oppladbare høreapparat: Slå av ditt høreapparat ved å holde inne den nederste bryteren, lengst vekk fra ledningen, i 5 sekunder til det kommer et fast rødt lys (gjøres på hvert høreapparat).
For høreapparater med utskiftbare batterier: Ta ut batteriet og la batteriluken være åpen. Dette forhindrer at høreapparatet piper.
- Legg høreapparatet i tørkeboksen, og skru lokket godt igjen.
- La gjerne høreapparatet ligge i boksen med en tørketablett over natten en gang iblant.

Tørketabletten vil skifte farge når den er ferdig, det er ingen fasit på hvor lenge en tørketablett holder, da det handler om hvor mye fukt som blir trukket ut av høreapparatet. Fukten er ikke nødvendigvis synlig, men kan påvirke høreapparatets funksjon.

Rensetabletter og rensekopp til ørepropp

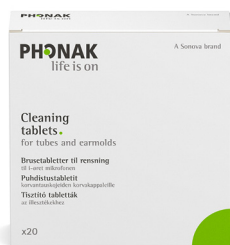

Forpakning med
renstabletter



Rensekopp



Rensetablett



Proppeblåser

Beskrivelse av bruk:

- Ta en renstablett ut av pakken og legg den i bunnen av rensekoppen.
- Ta øreproppen av høreapparatet. Du kan med fordel fjerne øreproppen fra slangen.
- Legg øreproppen i rensekoppen.
- Fyll koppen med lunkent vann til øreproppen er dekket. Skru lokket godt igjen, og la det virke i 15–30 minutter.
- Ta øreproppen ut og skyll den i kaldt vann.
- La øreproppen tørke over natten, eller bruk en proppeblåser for å tørke både lydkanalen og ventilasjonskanalen. Det er viktig at alt vannet er borte; ellers vil det ikke komme lyd ut av høreapparatet.

OBS! Høreapparatet må aldri legges i vann, heller ikke i vann med oppløste renstabletter.

Fremgangsmåte

Rengjøring av ørepropp

Rengjøring av øreproppen anbefales som en del av den ukentlige rutinen. For en grundig vask bør øreproppen fjernes både fra høreapparatet og slangen.



Fjern øreproppen fra slangen.




Etter vask kan det samle seg fuktdråper inne i øreproppen. En proppeblåser kan brukes til å føre luft gjennom øreproppen og fjerne disse. Alternativt kan du la øreproppen tørke over natten.

Bytte av tykkslange



Ta fra hverandre delene som vist på bildet. Dette inkluderer høreapparatet, slangen, EH-bend og øreproppen.

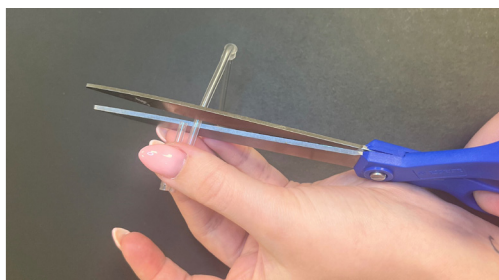

Klipp til en ny slange. Tips: Bruk den gamle slangen til å måle opp den nye slangen. Vær oppmerksom på at hvis den gamle slangen har blitt veldig stiv, kan den krympe. I så fall bør du klippe den nye slangen litt lengre.



Eterno, Phonak servicesenter og leverandør av Phonak tilbehør

Eterno er Phonaks samarbeidspartner og servicesenter, her kan du få utført enkel service og enkle reparasjoner, samt få veiledning og hjelp til annet vedlikehold.

Kort leveringstid på tilbehør bestilt gjennom nettbutikken:
www.eterno.no.

Besøksadresse: Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo
Åpningstider, butikk: Mandag-fredag, kl. 10 -16.
Åpningstider, telefon: Mandag-fredag, kl. 10 -14.
E-post: butikk@eterno.no
Tlf.: 940 99 500