


Vedlikeholdsguide for BTE-apparater

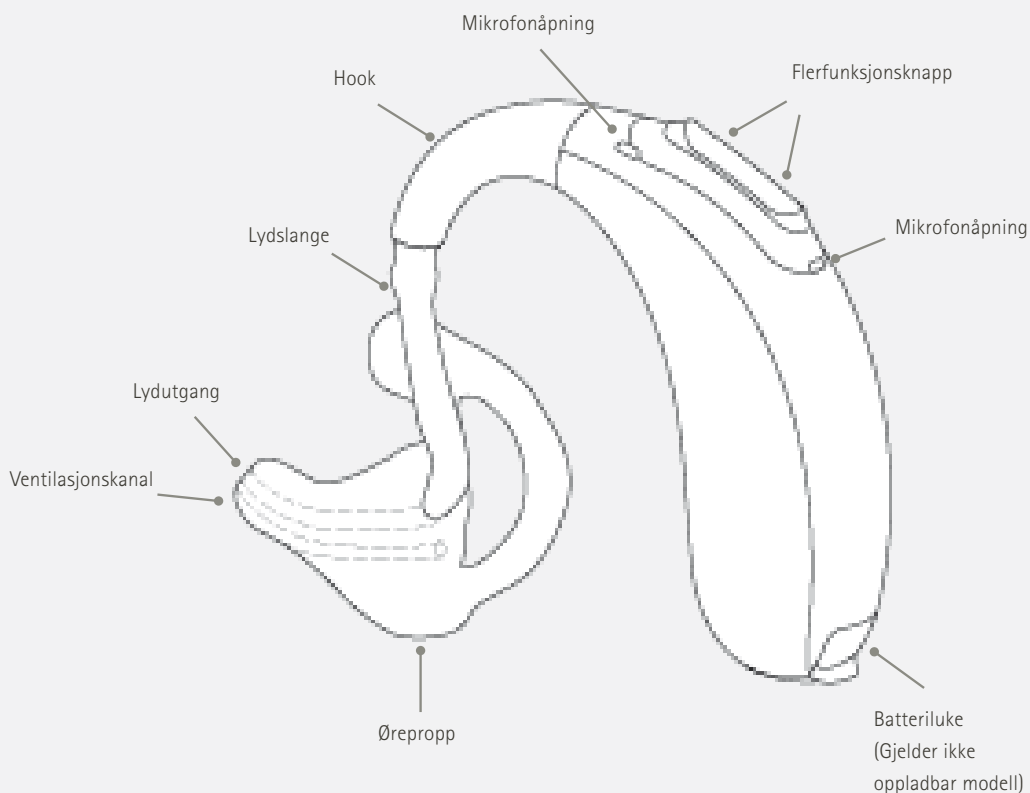

Rengjøring og vedlikehold

Det er viktig å rengjøre og vedlikeholde ditt høreapparat. En fast rutine på vedlikehold vil sikre at høreapparatet har lyd og holder seg i god stand de årene du har høreapparatet.



Ukentlig rutine

Undersøk om det ligger ørevoks på øreproppen. Ørevoks kan samle seg i proppen og forhindre at lyd kommer ut av høreapparatet. Sørg for å holde både ventilasjonshull og lydkanal åpen.

Rengjør overflatene på høreapparatet med en myk klut som ikke loer eller med en egen rengjøringsklut for høreapparater.

OBS! Ikke bruk vann, såpe eller rengjøringsmidler.

Rengjør øreproppen med en myk og fuktig klut.

Renseverktøy som det kan være lurt å ha er proppeblåser og børste. Proppeblåser brukes til å blåse gjennom ventilasjonskanal og lydkanal på støpte propper. Børste kan brukes til å børste over mikrofonåpningene og andre steder hvor smuss kan tenkes å samle seg, f.eks. rundt knappen.



Børstesett



Proppeblåser

Månedlig rutine

Sjekk at det ikke har samlet seg smuss over mikrofonåpningene på høreapparatet. Smuss kan børstes bort med en egnet børste. Mikrofonåpningene er "hullene" over og under bryteren på høreapparatet.

Grundig rengjøring av ørepropp og bytte av tykkslange. Den støpte proppen bør tas av og vaskes en gang iblant. Bruk mildt rengjøringsmiddel eller rensetabletter laget spesielt for rens av ørepropper.

Generiske propper produseres ikke av Phonak. For renseverktøy spesielt laget for dine propper, ta kontakt med din proppeleverandør.

Ulike deler

Tykkslange

Denne går mellom høreapparat og ørepropp, og må skiftes jevnlig. Tykkslangen vil bli stiv, hard og krympe etter en tids bruk. Når tykkslangen har stivnet, vil det bli vanskeligere å skifte slange. Tykkslange kommer i lengde på 50 cm og klippes til ønsket lengde med en saks. Vi anbefaler at denne skiftes hver tredje måned.

Tubelock-slange

Denne slangen har en feste-ring som presses inn i øreproppen og brukes primært på myke ørepropper. Her må gammel slange dras ut av øreproppen. Den nye tubelock-slangen settes inn og dras gjennom øreproppen til feste-ringene sitter godt festet i øreproppen. Man klipper av slangen som kommer ut av øreproppen og tilpasser lengden som festes til høreapparatet.

Hook

Hook er bøylene med filter som er festet på høreapparatene. Skiftes ved fukt eller brudd/skade. Det sitter et filter i hooken som kan "blåse" seg opp ved kontakt med fukt. Dersom dette har skjedd, vil høreapparatet kunne bli stumt. Hvis hooken ikke har filter, så kan du bruke en proppeblåser til å blåse ut fukt/kondens.

EH-bend

Festebøylen som fester øreproppen til slangen. Ved skade eller slitasje kan den skiftes ut. Vær obs på at ikke alle ørepropper har EH-bend, noen har fastmontert festebøyle. Hvis du er usikker på hva du har, kontakt din audiograf.



Tubelock



Hook



EH-bend

Fuktproblematikk

Fukt kan påvirke høreapparatet og ørepropp ved at det samler seg fuktdråper i øreproppen og i mikrofonene på høreapparatet. Da vil høreapparatet kunne bli stumt. Dette kan være et problem spesielt om sommeren når man svetter mer eller hvis man er mye ute i all slags vær. Da kan det være lurt å ta i bruk en tørkeboks og/eller tørketabletter.

OBS! Noen oppladbare høreapparat har tilhørende lader hvor det er rom for tørketablett.



Tørkeboks




Tørketablett

Beskrivelse av bruk:

- Ta en tørketablett ut av pakken og legg i bunnen av tørkeboksen.
Ved oppladbare høreapparat: Slå av ditt høreapparat ved å holde inne nederste bryter lengst vekk fra ledningen i 5 sekunder til det kommer et fast rødt lys (gjøres på hvert høreapparat).
Ved høreapparater med utskiftbare batterier: Ta ut batteriet og la batteriluken være åpen. Dette gjør at høreapparatet ikke vil pipe.
- Legg høreapparatet i tørkeboksen, og skru lokket godt igjen.
- La gjerne høreapparatet ligge over natten en gang iblant i boksen med en tablett.

Tørketabletten vil skifte farge når den er ferdig, det er ingen fasit på hvor lenge en tørketablett holder, da det handler om hvor mye fukt som blir trukket ut av høreapparatet. Fukten er ikke nødvendigvis synlig, men kan påvirke høreapparatets funksjon.

Rensetabletter og rensekopp til ørepropp

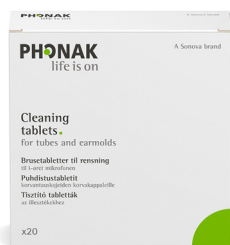

Forpakning med
renstabletter



Rensekopp



Rensetablett



Proppeblåser

Beskrivelse av bruk:

- Ta en renstablett ut av pakken og legg i bunnen av koppen.
- Ta øreproppen av høreapparatet, helst ta øreproppen av slangen.
- Legg øreproppen i rensekopp.
- Fyll koppen med lunkent vann til det dekker øreproppen. Skru lokket godt igjen, la virke i 15-30 minutter.
- Ta ut øreproppen og skyll av i kaldt vann.
- La øreproppen tørke over natten, eller bruk en proppeblåser for å tørke både lyd- og ventilasjonskanalen til øreproppen. Det er viktig at alt vannet er borte, hvis ikke kommer det ingen lyd ut av høreapparatet.

OBS! Høreapparatet må ikke legges i vann, heller ikke i vann som renstablettene er løst opp i.

Fremgangsmåte

Rengjøring av ørepropp

Rengjøring av ørepropp er noe om anbefales å gjøre i sin ukentlige rutine. Ved en grundig vask av ørepropp anbefales det at denne fjernes fra høreapparat og slange.



Øreproppen fjernes fra slangen.




Etter vask kan det samle seg fuktdråper inne i øreproppen. Det kan brukes en proppeblåser for å få luft gjennom øreproppen for å fjerne disse.

Bytte av slange



Ta fra hverandre delene i høreapparatet. Her vises høreapparat, slange, EH-bend og ørepropp.

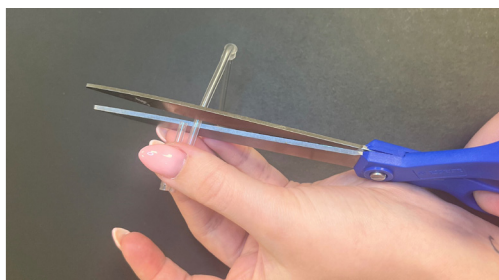

Klipp til ny slange. Tips: Bruk den gamle slangen til å måle opp den nye slangen. Vær obs på at dersom slangen har blitt veldig stiv, kan den krympe. Klipp da den nye slangen litt lengre.



Eterno, Phonak servicesenter og leverandør av Phonak forbruksmateriell

Eterno er Phonaks samarbeidspartner og servicesenter, her kan du få utført enkel service og enkle reparasjoner, samt få veiledning og hjelp til annet vedlikehold.

Kort leveringstid på forbruksmateriell bestilt gjennom nettbutikken:
www.eterno.no.

Besøksadresse: Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo
Åpningstider, butikk: Mandag-fredag, kl. 10 -16.
Åpningstider, telefon: Mandag-fredag, kl. 10 -14.
E-post: butikk@eterno.no
Tlf.: 940 99 500