

# Telefonieren leicht gemacht – mit Roger™

Anleitung



# Alle Mikrofon-Optionen auf einen Blick



Telefon-Option	Roger On™	Roger Table Mic	Roger Select™	Roger Select™ iN	Seite
<p>PC / Notebook für Telefongespräche über das Internet (via USB-Kabel)</p>	●				3
<p>Mobilgerät / PC / Notebook für Telefongespräche über das Internet (drahtlos via Bluetooth®)</p>			●*		4
<p>PC / Notebook für Telefongespräche über das Internet (via Kabel)</p>	●	●	●	●	5
<p>Stationäres Tischtelefon (via Kabel)</p>	●	●	●	●	6
<p>Call Center (via Bluetooth)</p>			●		7

\* Diese Methode funktioniert nicht mit Hörsystemen mit RogerDirect™  
 Die Bluetooth® Wortmarke und die Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung dieser Marken durch die Sonova AG erfolgt unter Lizenz.

# PC / Notebook für Telefongespräche über das Internet

(VoIP, z.B. Zoom, MS Teams) via USB-Kabel


## Erforderliche Geräte



Roger On V2  
 Roger On iN V2  
 Roger On 3

## Verwenden des USB-Kabels

- 1 Verbinden Sie das USB-Kabel zwischen Ihrem PC/Notebook/Tablet/Smartphone und Roger On
- 2 Während des Telefongesprächs können Sie auf drei Arten direkt in Ihren Roger On sprechen:
  - Legen Sie Roger On flach auf den Tisch
  - Legen Sie Roger On geneigt auf den Tisch, so dass Roger On in Ihre Richtung zeigt
  - Für eine optimale Sprachaufnahme, befestigen Sie Roger On an Ihrer Kleidung
- 3 Sie hören das Telefongespräch auf beiden Ohren!

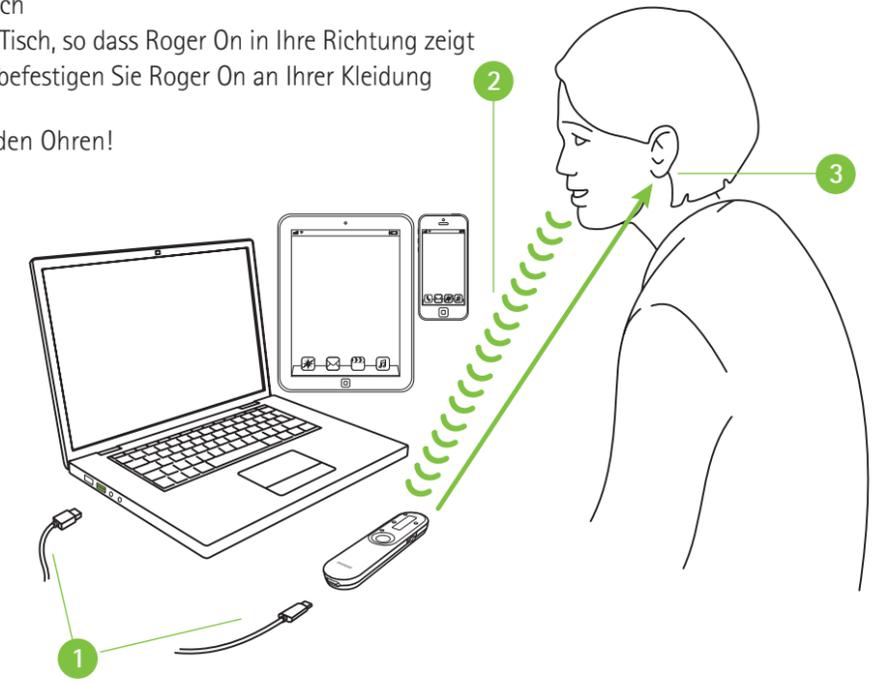

# Mobilgerät / PC / Notebook drahtlos via Bluetooth


## Erforderliche Geräte



Roger Select  
Roger Select 3


## Verwenden von Bluetooth

Koppeln Sie Roger Select einfach mit Ihrem bluetoothfähigen Mobilgerät / PC / Notebook. Sie müssen Ihr Telefon zum Telefonieren nicht ans Ohr halten. Und das Allerbeste: Sie hören das Telefongespräch auf beiden Ohren!

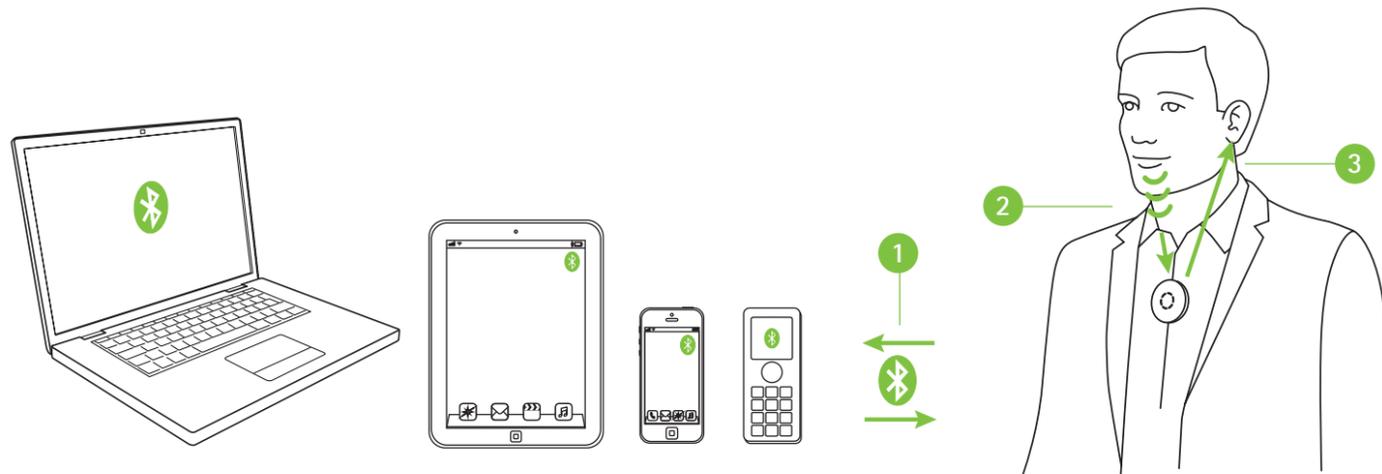

- 1 Koppeln Sie Ihr Mobilgerät / PC / Notebook mit Roger Select
- 2 Sprechen Sie während des Telefongesprächs einfach in das Roger Select
- 3 Sie hören das Telefongespräch auf beiden Ohren!

Sollte Ihr PC / Notebook nicht bluetoothfähig sein, stecken Sie den Bluetooth-USB-Adapter in eine freie USB-Anschlussbuchse an Ihrem PC / Notebook und koppeln Sie den Bluetooth-USB-Adapter mit Roger Select.

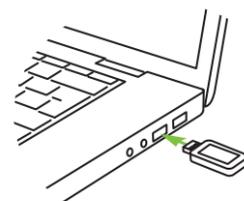

Hinweis: Diese Methode funktioniert nicht mit Hörsystemen mit RogerDirect™.

# PC/Notebook für Telefongespräche über ein Audiokabel

## Erforderliche Geräte (Optionen)



Roger Select  
alle Varianten



Roger Table Mic  
alle Varianten




Roger On  
alle Varianten

## Verwenden eines integrierten Mikrofons am PC / Notebook

Dank dieser einfach einzurichtenden Option können Sie das Telefongespräch direkt auf beiden Ohren hören.

- 1 Verbinden Sie den Kopfhörerausgang an Ihrem PC / Notebook mit dem Audioeingang an der Dockingstation oder direkt mit dem Audioeingang am Roger-Mikrofon
- 2 Sprechen Sie während des Telefongesprächs in das integrierte Mikrofon am PC / Notebook
- 3 Sie hören das Telefongespräch auf beiden Ohren!

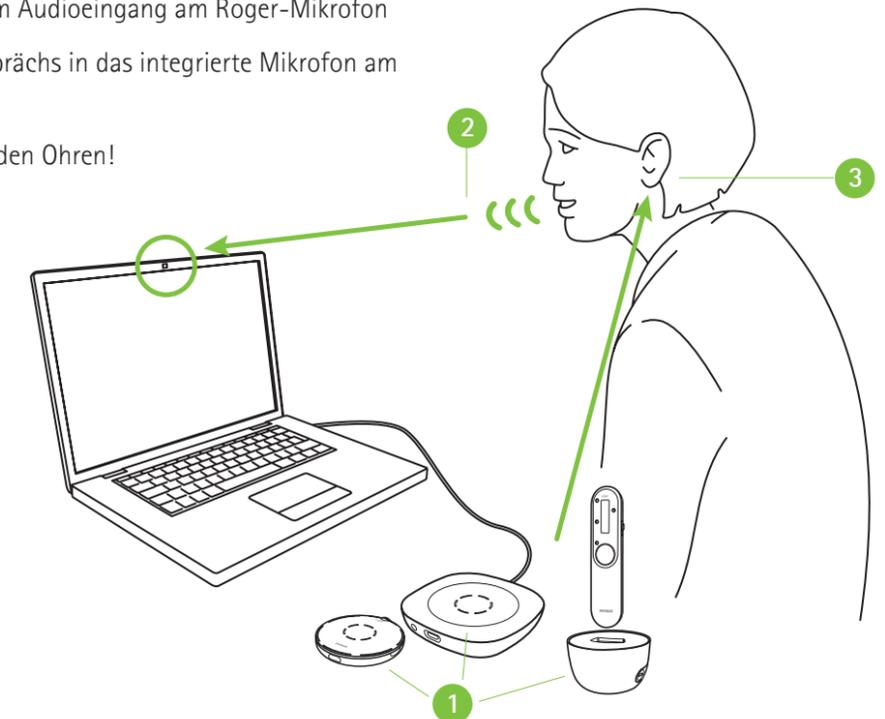

# Stationäre Tischtelefone

via Kabel

## Erforderliche Geräte (Optionen)



Roger Select  
alle Varianten



Roger Table Mic  
alle Varianten



Roger On  
alle Varianten




Telefon-Aufnahmadapter  
(z. B. Vec LRX-35)

## Verwenden des Telefon-Aufnahm adaptors

Um das Telefongespräch anzunehmen, nehmen Sie das Mobilteil in die Hand und halten Sie es an Ihren Mund, da Sie nach wie vor in das Mobilteil sprechen müssen.

Die Stimme des Anrufers wird dann jedoch direkt an beide Ohren übertragen.

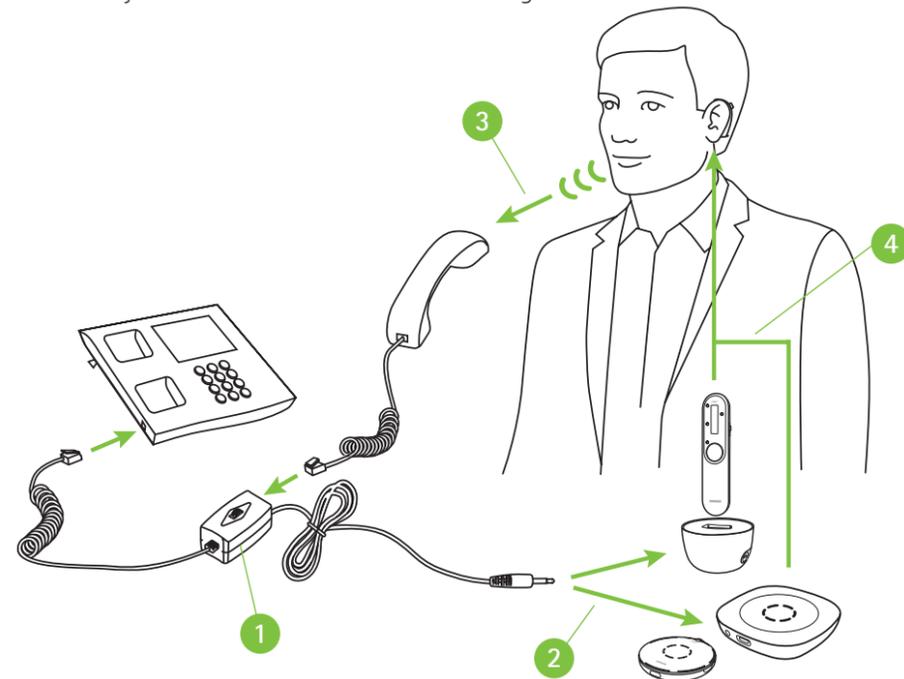

- 1 Verbinden Sie den Telefon-Aufnahmadapter mit dem Telefon und dem Mobilteil
- 2 Verbinden Sie den Audioausgang des Telefon-Aufnahm adaptors mit dem Audioeingang an der Dockingstation oder direkt mit dem Audioeingang am Roger-Mikrofon
- 3 Sprechen Sie während des Telefongesprächs in das Mobilteil des Telefons
- 4 Sie hören das Telefongespräch auf beiden Ohren!


# Call Center

(PC / Notebook und Tischtelefon) drahtlos via Bluetooth

## Erforderliche Geräte




Roger Select  
Roger Select 3

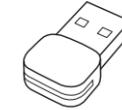

Kommunikationsanschluss für Headset (z. B. Poly MDA200), Bluetooth-USB-Adapter (z. B. Poly PLT-BT300)

## Verwenden von Bluetooth

Die modernste Lösung für Telefongespräche im Büro. Telefongespräche können zwischen PC und Bürotelefon hin und her geschaltet werden. In beiden Fällen wird das Telefongespräch an das Roger Select übertragen, das idealerweise um den Hals getragen wird und auf diese Weise dafür sorgt, dass Sie während des Telefongesprächs beide Hände frei haben.

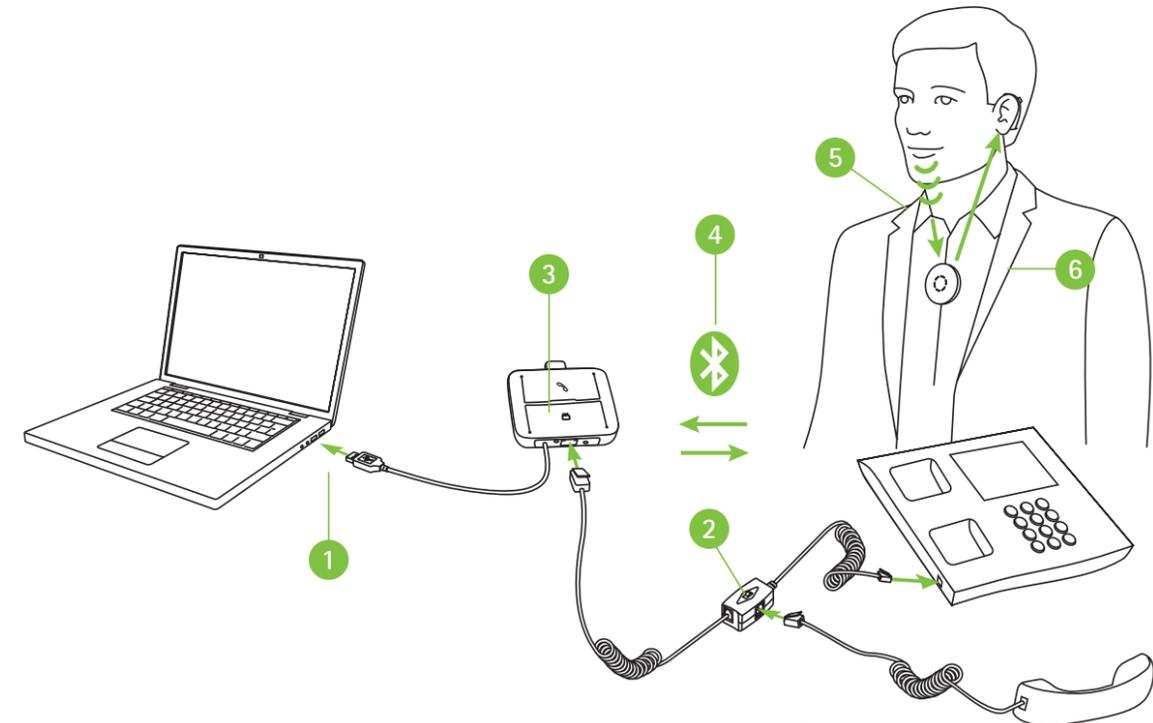

- 1 Verbinden Sie den Kommunikationsanschluss für das Headset mit Ihrem PC / Notebook
- 2 Verbinden Sie den Adapter des Kommunikationsanschlusses für das Headset mit dem Telefon und dem Mobilteil
- 3 Stecken Sie den Bluetooth-USB-Adapter am Kommunikationsanschluss für das Headset ein
- 4 Koppeln Sie den Bluetooth-USB-Adapter mit dem Roger Select
- 5 Sprechen Sie während des Telefongesprächs in das Roger Select
- 6 Sie hören das Telefongespräch auf beiden Ohren!

Hinweis: Diese Methode funktioniert nicht mit Hörsystemen mit RogerDirect™.

# life is on

Seit 1947 setzt sich Phonak dafür ein, Menschen den Zugang zu neuen Klangwelten zu eröffnen und ihnen so mehr Lebensqualität zu ermöglichen. Schon als das Unternehmen gegründet wurde, ließen wir uns bei Phonak von einer zentralen Annahme leiten: Wir glauben, die Fähigkeit gut zu hören ist eng mit dem Wohlbefinden verknüpft und trägt damit maßgeblich dazu bei, das Leben in vollen Zügen genießen zu können. Tatsächlich gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen unserem Hörvermögen und unserem emotionalen, kognitiven und körperlichen Wohlbefinden. Deshalb hat es sich Phonak zum Ziel gesetzt, das vielfältigste Portfolio an innovativen Hörlösungen anzubieten – sowohl jetzt als auch in Zukunft. Phonak arbeitet eng mit Hörakustiker:innen zusammen und konzentriert sich dabei auf das, was wirklich wichtig ist: Ein besseres Sprachverstehen, eine höhere Lebensqualität und eine positive Wirkung auf die Gesellschaft als Ganzes.

[www.phonak.com](http://www.phonak.com)