

# Phonak


## Referencialap

### A RogerDirect™ használata Phonak hallókészülékkel

**Fontos:** Ajánlott, hogy a telepítés/eltávolítás során a Roger telepítőegységek között legalább 3 méter távolság legyen, és a Roger telepítőegység közelében az összes többi hallókészülék ki legyen kapcsolva. Ajánlott, hogy a Roger telepítőegység közelében lévő Roger eszközöket kapcsolja ki a telepítés során.

#### A Roger™ vevőegység telepítése egy Phonak hallókészülékre Roger X segítségével

- Csatlakoztassa a Roger X-et a Roger telepítőegységhez (3).
- Kapcsolja be a Roger telepítőegységet (1) (a jelzőfény (2) folytonos zöldre vált).
- A jelzőfény (4) folytonos zöldre vált (a Roger X készen áll a telepítésre).
- Kapcsolja be a hallókészüléket, és helyezze a hallókészülék logóra.
- Várja meg, amíg a jelzőfény (5) zölden villogni kezd (telepítés folyamatban); amikor a jelzőfény folytonos zöldre vált, a telepítés befejeződött.
- Kapcsolja ki a Roger telepítőegységet. Távolítsa el és tegye el a Roger X-et. A hallókészülék készen áll a RogerDirect használatára.

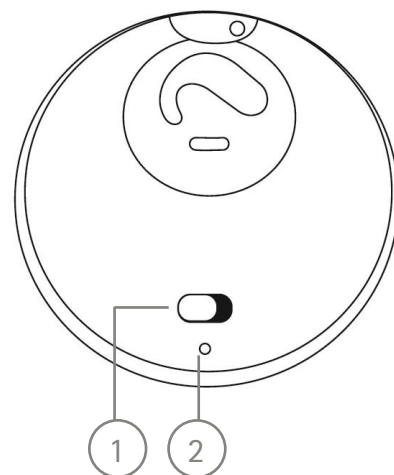

#### A Roger vevőegység eltávolítása egy Phonak hallókészülékről Roger X segítségével

- Csatlakoztassa a Roger X-et a Roger telepítőegységhez (3).
- Kapcsolja be a Roger telepítőegységet (1) (a jelzőfény (2) folytonos zöldre vált).
- A jelzőfény (4) inaktív marad néhány másodpercig (a Roger X készen áll az eltávolításra).
- Kapcsolja be a hallókészüléket, és helyezze a hallókészülék logóra.
- Várja meg, hogy a jelzőfény (5) folytonos zöldre váltson (megerősíti, hogy a Roger telepítve van a hallókészülékre).
- Az eltávolítás megkezdésekor a jelzőfény (5) zölden villog, amíg a folyamat véget nem ér.
- A jelzőfény (4) folytonos zöldre vált az eltávolítás befejezését követően (a Roger ekkor telepítve van a Roger X-re).
- Kapcsolja ki a Roger telepítőegységet. Távolítsa el a Roger X-et. A hallókészülék már nem használható a Rogerrel.

