

# フォナック

# ロジャー iN マイクロホン

## ロジャー iN マイクロホン インストール ガイド

### 目次


ロジャー デイレクトを使用したロジャー受信機の補聴器へのインストール.....	1
ロジャー iN マイクロホンのロジャー受信機の台数の確認.....	2
補聴器からのロジャー受信機のアンインストール.....	3

### ロジャー デイレクトを使用したロジャー受信機の補聴器へのインストール


補聴器にフォナック ターゲット6.1以降で利用可能な最新のFWが入っていることを確認します。

インストール手順:


1. ロジャー iN マイクロホンのスイッチを入れてください
2. インジケータライトが緑色に点滅するまで約2秒間、インストール ボタンを長押しします。

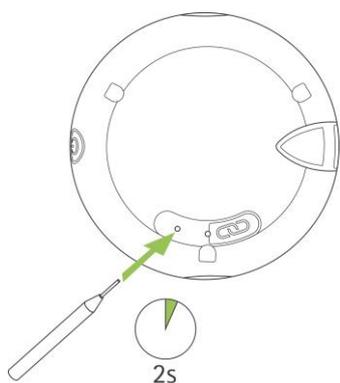

ロジャー セレクト iN

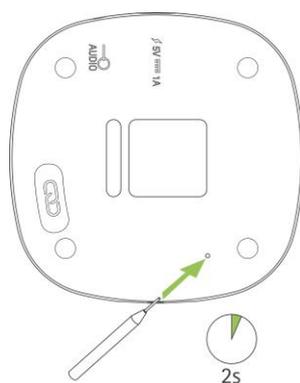


ロジャー テーブルマイク II iN

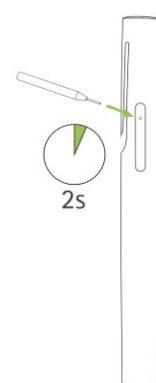

ロジャー ペン iN

3. ロジャー iN マイクロホンをテーブルの上に置きます
4. 補聴器1台の電源を入れます(他の補聴器はオフのままにしておきます)

5. 補聴器をロジャー iN マイクロホンの近くに置きます(10 cm 以内)

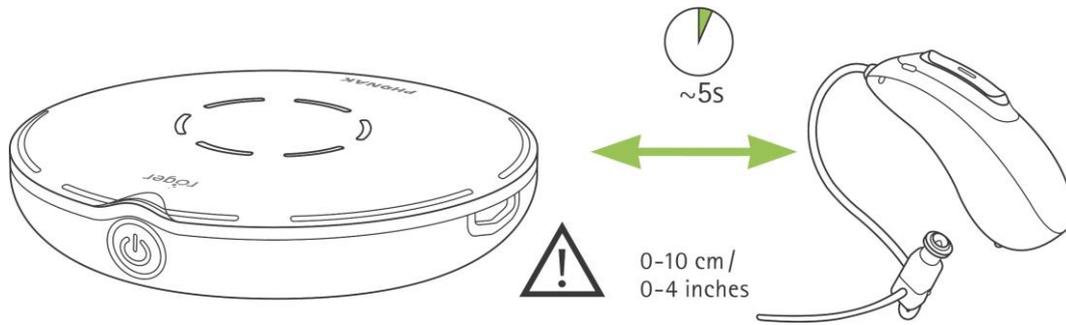

6. ロジャー iN マイクロホンのインジケータライトが緑色に点灯するまで約5秒待ちます

7. 2台目の補聴器にステップ2から6を繰り返します。


注: 補聴器は自動的にロジャー iN マイクロホンに接続されます。

取り付け手順後にインジケータライトが赤色に点灯する場合は、インストールがうまく行っていません。これは次のような理由であることがあります。


- ロジャー iN マイクロホンと補聴器との間の距離が遠すぎた
- ロジャー iN マイクロホンにロジャー受信機がインストールされていない
- 補聴器にすでにロジャーがインストールされている
- 補聴器がロジャーダイレクトに対応していない。

## ロジャー iN マイクロホンのロジャー受信機の台数の確認


ロジャー マイクロホンの電源を入れた後、ロジャー iN マイクロホンのインストール ボタンを短く押します。

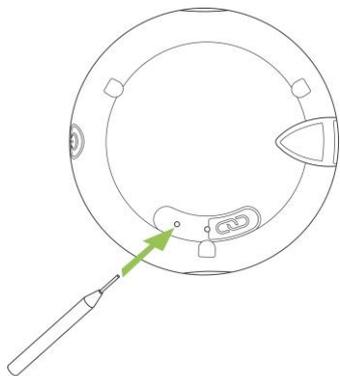

ロジャー セレクト iN

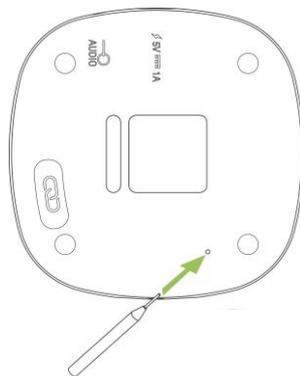

ロジャー テーブルマイク II iN

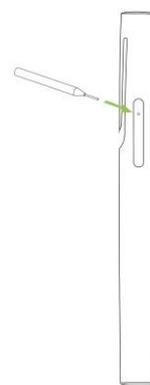

ロジャー ペン iN


インジケータライト フィードバックにより、利用可能なロジャー受信機数がわかります。

- ● 2台のロジャー受信機が取り付け済み
- ● 1台のロジャー受信機が取り付け済み
- ● 取り付け済みのロジャー受信機なし


## 補聴器からのロジャー受信機のアインストール

### アインストール手順:


1. ロジャー iN マイクロホンのスイッチを入れてください
2. インジケータライトが緑色に点滅し始めるまで約2秒間インストール ボタンを長押しします

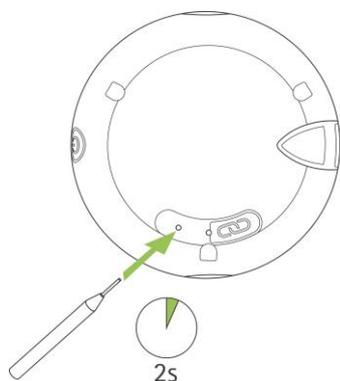

ロジャー セレクト iN

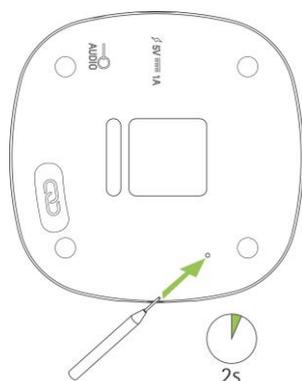


ロジャー テーブル マイク II iN

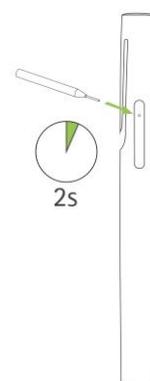

ロジャー ペン iN

3. ロジャー iN マイクロホンテーブルの上に置きます
4. 補聴器1台の電源を入れます(他の補聴器はオフのままにしておきます)
5. 補聴器をロジャー iN マイクロホンの近くに置きます(10 cm 以内)

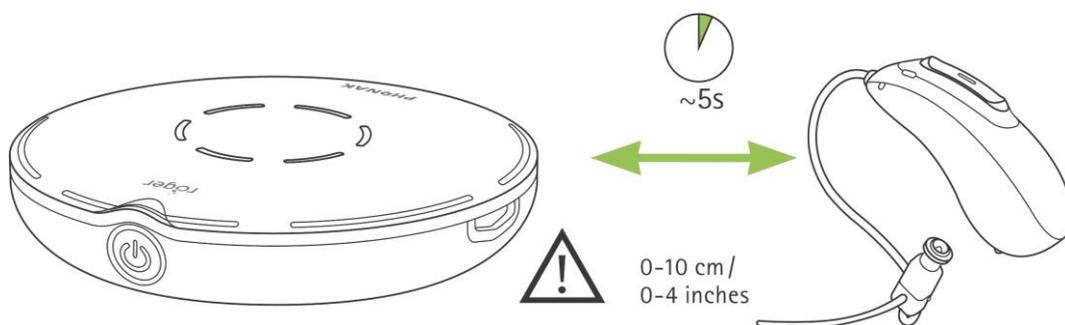

6. ロジャー iN マイクロホンのインジケータライトが緑色に点灯するまで約5秒待ちます
7. 必要であれば、2台目の補聴器にステップ2から6を繰り返します。

アインストール手順後にインジケータライトが赤色になる場合は、アインストール手順がうまく行っていません。これは次のような理由であることがあります。

- ロジャー iN マイクロホンと補聴器との間の距離が遠すぎた
- ロジャー iN マイクロホンにすでに2台のロジャー受信機がインストールされている
- 補聴器にロジャーがインストールされていない
- 補聴器がロジャーダイレクトに対応していない。