






# Eenvoudig bellen met Roger™

Gids

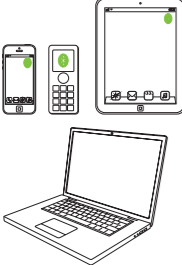

# Een kort overzicht van alle microfoonopties

Telefoonoptie	Roger On™	Roger Table Mic	Roger Select™	Roger Select™ iN	Pagina
 Pc/laptop voor telefoongesprekken via internet (via USB-kabel)	●				3
 Draagbaar apparaat/pc/laptop voor telefoongesprekken via internet (draadloos via Bluetooth®)			●*		4
 Pc/laptop voor telefoongesprekken via internet (via kabel)	●	●	●	●	5
 Vaste telefoon (via kabel)	●	●	●	●	6
 Callcenter (via Bluetooth)			●		7

\* Deze oplossing werkt niet voor hoortoestellen met RogerDirect™

Het woordmerk en het logo Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.; deze merken worden door Sonova AG onder licentie gebruikt.

# Pc/laptop voor telefoongesprekken via internet

(VoIP, bv. Zoom, MS Teams) via USB-kabel


## Vereist apparaat



Roger On v2  
Roger On iN v2  
Roger On 3

## Een USB-kabel gebruiken

- 1 Sluit de USB-kabel aan op uw pc/laptop/tablet/smartphone en Roger On
- 2 Tijdens het telefoongesprekken kunt u op drie manieren direct in uw Roger On praten:
  - Plaats Roger On plat op tafel
  - Plaats Roger On in een hoek op tafel zodat Roger On op u gericht staat
  - Bevestig Roger On op uw shirt zodat deze uw stem het best kan oppikken
- 3 U hoort de stem van de beller in beide oren!

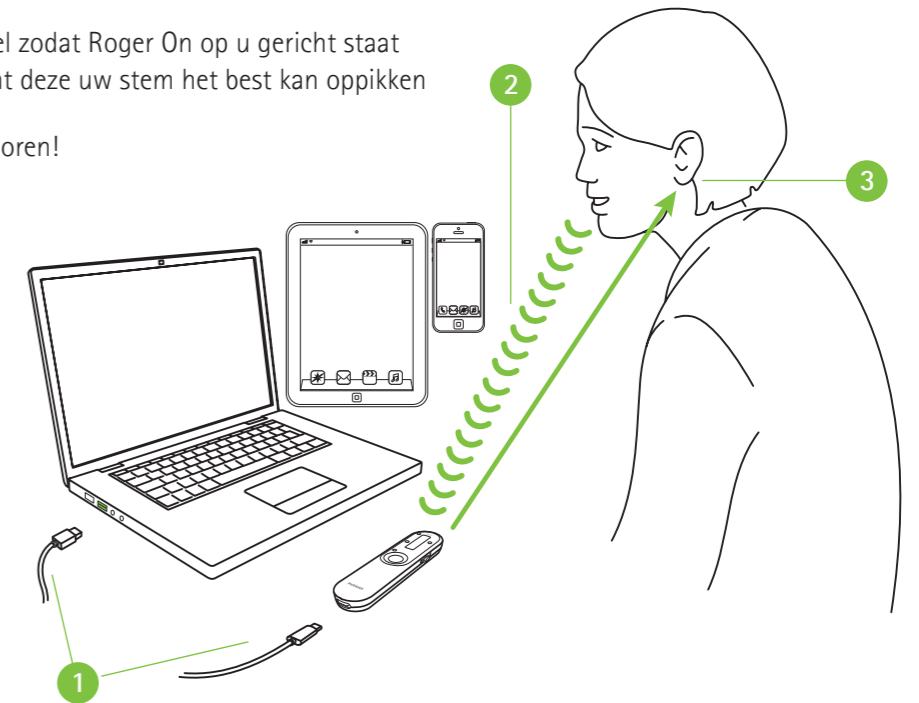

## Draagbaar apparaat/pc/laptop, draadloos via Bluetooth


### Vereist apparaat



Roger Select  
Roger Select 3


### Bluetooth gebruiken

U hoeft slechts de Roger Select te koppelen aan uw draagbare Bluetooth-apparaat, pc of laptop. Tijdens het telefoongesprek hoeft u de telefoon niet tegen uw oor te houden. Het grootste voordeel is dat u de stem van de beller in beide oren hoort!

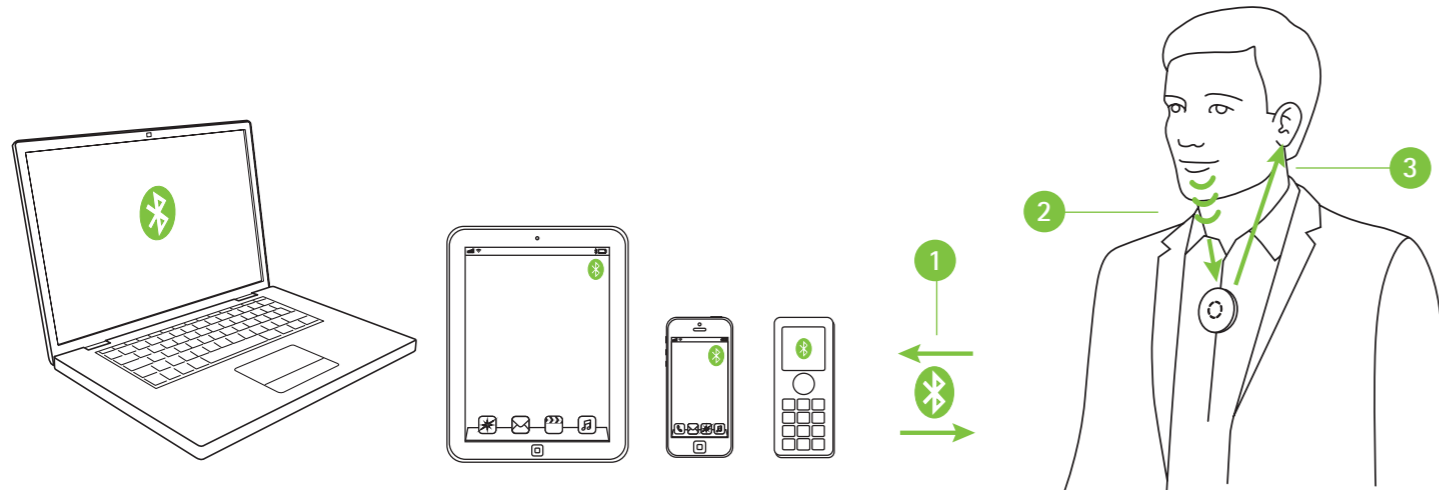

- 1 Koppel uw draagbare apparaat, pc of laptop aan de Roger Select
- 2 Praat tijdens het telefoongesprek eenvoudigweg in de Roger Select
- 3 U hoort de stem van de beller in beide oren!

Als uw pc of laptop geen ingebouwde Bluetooth heeft, kunt u de Bluetooth USB-adapter aansluiten op een ongebruikte USB-poort op uw pc of laptop. Vervolgens koppelt u de Bluetooth USB-adapter aan de Roger Select.

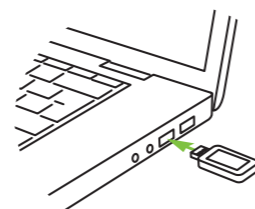

Opmerking: deze oplossing werkt niet voor hoortoestellen met RogerDirect™.

## Pc/laptop voor telefoongesprekken via audiokabel

### Vereiste toestellen (opties)



Roger Select  
alle varianten



Roger Table Mic  
alle varianten




Roger On  
alle varianten

### De geïntegreerde microfoons van een pc/laptop gebruiken

Deze eenvoudig in te stellen optie verzendt de stem van de beller rechtstreeks naar beide oren.

- 1 Verbind de hoofdtelefoon-output van uw pc/laptop met de audio input van het dockingstation of rechtstreeks met de audio input van de Roger microfoon
- 2 Praat tijdens het gesprek in de geïntegreerde microfoon van uw pc/laptop
- 3 U hoort de stem van de beller in beide oren!

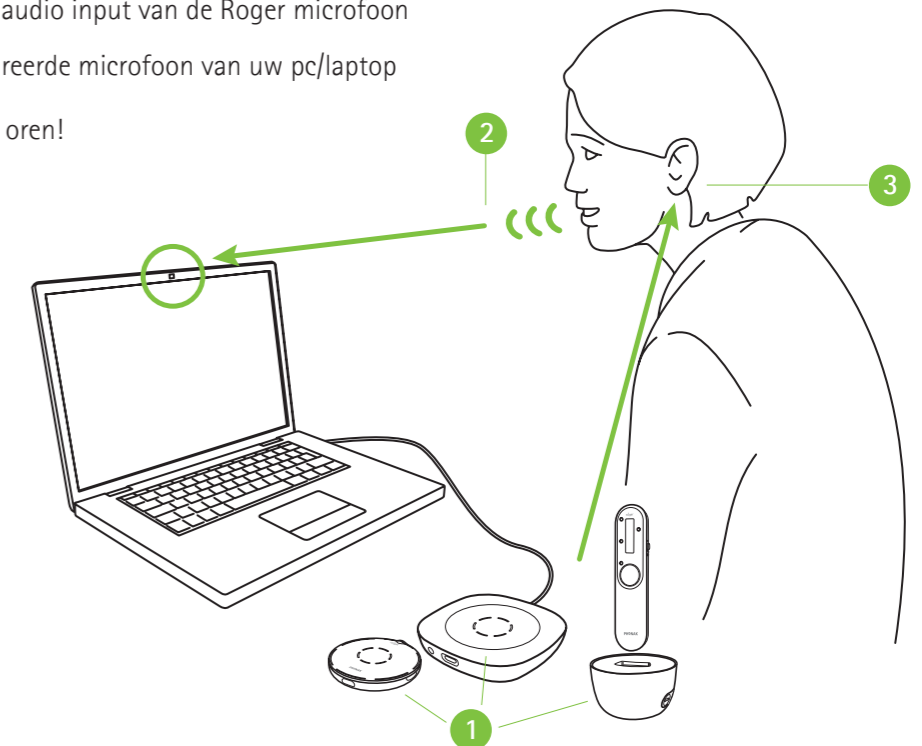

# Vaste telefoons

(via kabel)

## Vereiste toestellen (opties)




Roger Select  
alle varianten



Roger Table Mic  
alle varianten




Roger On  
alle varianten

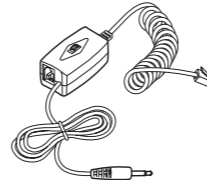

Telefoonopname-adapter  
(bijv. Vec LRX-35)

## De telefoonopname-adapter gebruiken

Bij het aannemen van een telefoongesprek, neemt u de hoorn in de hand en houdt u deze bij uw mond; u dient namelijk nog steeds in de hoorn te praten. De stem van de beller wordt echter wel rechtstreeks naar beide oren verzonden.

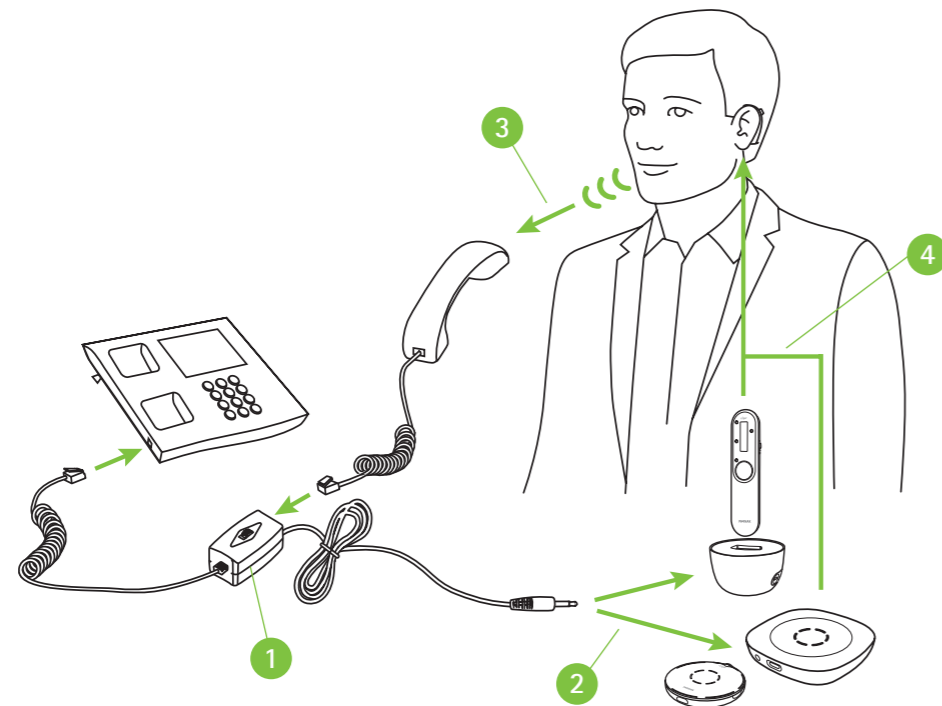

- 1 Installeer de telefoonopname-adapter tussen de telefoonhouder en de hoorn
- 2 Verbind de audio-output van de telefoonopname-adapter met de audio-input van het dockingstation of rechtstreeks met de audio-input van de Roger microfoon
- 3 Praat tijdens het gesprek in de hoorn van de telefoon
- 4 U hoort de stem van de beller in beide oren!



# Callcenter

(Pc/laptop en bureautelefoon) draadloos via Bluetooth

## Vereist apparaat




Roger Select  
Roger Select 3

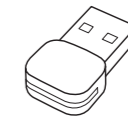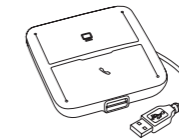

Communicatiehub voor hoofdtelefoons (bv. Poly MDA200),  
Bluetooth USB-adapter (bv. Poly PLT-BT300)

## Bluetooth gebruiken

Dit is de meest geavanceerde oplossing voor telefoongesprekken in drukke kantoren. Telefoons kunnen worden overgeschakeld tussen telefonie via de pc en via de vaste telefoon. In beide gevallen wordt de telefoon doorgestuurd naar de Roger Select, welke idealiter om de nek wordt gedragen zodat tijdens het telefoongesprek beide handen vrij zijn.

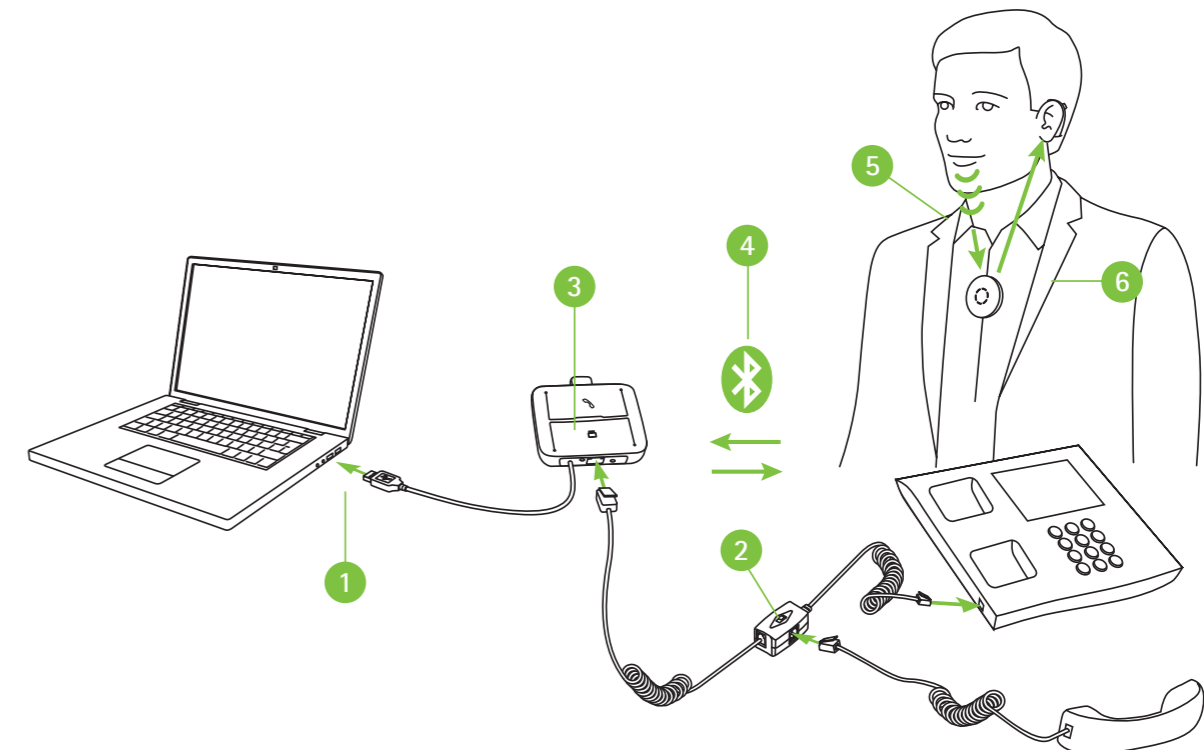

- 1 Verbind het communicatiesysteem met hoofdtelefoon met uw pc/laptop
- 2 Installeer de adapter van het communicatiesysteem met hoofdtelefoon tussen de telefoonhouder en de hoorn
- 3 Sluit de Bluetooth USB-adapter aan op het communicatiesysteem met hoofdtelefoon
- 4 Koppel de Bluetooth USB-adapter met de Roger Select
- 5 Praat tijdens het gesprek in de Roger Select
- 6 U hoort de stem van de beller in beide oren!

Opmerking: deze oplossing werkt niet voor hoortoestellen met RogerDirect™.

# life is on

Sinds 1947 zet Phonak zich in om de levenskwaliteit te behouden door nieuwe akoestische werelden te openen. Zelfs al in deze eerste jaren werd ons bedrijf gedreven door een fundamentele overtuiging: We geloven dat goed horen gelijk staat aan je goed voelen en dus essentieel is om alles uit het leven te halen. Het is zelfs zo dat het zintuig 'gehoor' wordt gekoppeld aan sociaal, emotioneel, cognitief en fysiek welzijn. We streven ernaar om het meest uitgebreide portfolio van innovatieve hooroplossingen te bieden, vandaag en in de toekomst. En samen met onze audiciens blijven we ons richten op wat er het meest toe doet: spraakverstaan verbeteren, de levens van personen veranderen en een positief effect op de algehele maatschappij hebben.

[www.phonak.com](http://www.phonak.com)