

# Lyric



Snelgids  
van  
SoundLync



**AAN** 1 geluidssignaal  
(verwijderen)

---

**SLAAPSTAND** 2 geluidssignalen  
(verwijderen)

---

**UIT** 2 geluidssignalen  
(vasthouden)  
4 geluidssignalen

**PHONAK**

# Lyric



Snelgids  
van  
SoundLync

## VOLUME

2 geluidssignalen

(verwijderen gedurende 2 sec.)

1 geluidssignaal (vasthouden)

---

Volume wordt in stappen geregeld

Elke stap: harder geluidssignaal

Maximum instelling: dubbel geluidssignaal

---

Opmerking: Tijdens het aanpassen van het volume wordt de Lyric gedempt

0018-1 200-077201 4-06 /nsw/ Printed in **XXXX** ©Phonak AG. All rights reserved

**PHONAK**