


5

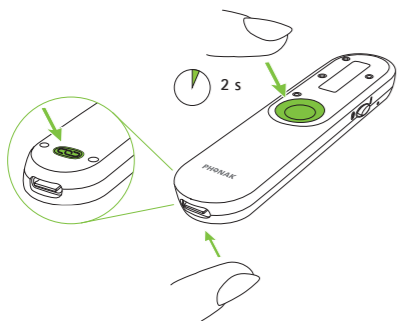


Press and hold the large center button and the small button with the chain icon on the backside for two seconds.

Halten Sie gleichzeitig die grosse mittlere Taste und die kleine Taste mit dem Kettensymbol auf der Rückseite zwei Sekunden lang gedrückt.

Appuyez et maintenez le grand bouton central et le petit bouton avec l'icône de la chaîne à l'arrière pendant deux secondes.

Houd de grote middelste knop en de kleine knop met het kettingpictogram op de achterkant twee seconden ingedrukt.

6

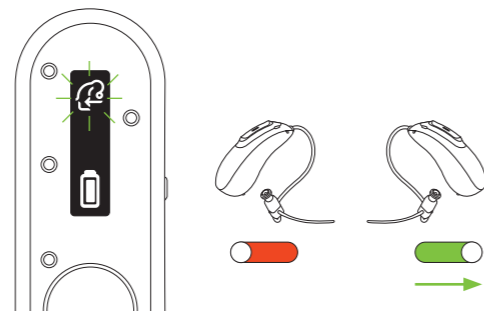


You should see a flashing hearing aid icon. Then switch on your right hearing aid and place it close to Roger On.

Sie sollten nun ein blinkendes Hörgerät-Symbol sehen. Schalten sie nun Ihr rechtes Hörgerät ein und legen Sie es nahe Roger On.

Vous devriez voir une icône d'aide auditive clignotante. Allumez maintenant votre aide auditive droite et placez-la à proximité de Roger On.

U zou een knipperend hoortoestelpictogram moeten zien. Schakel nu uw rechterhoortoestel in en plaats het dicht bij Roger On.

7

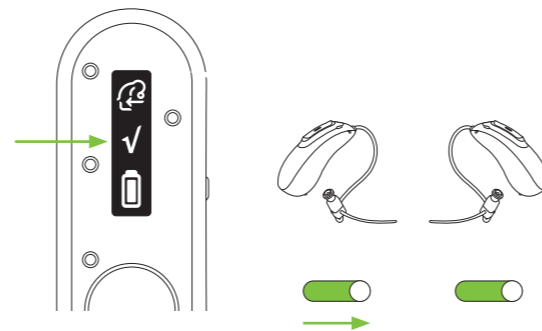


Wait a few seconds until you see a solid green LED. Then switch on your other hearing aid.

Warten Sie, bis Sie eine konstante grüne LED sehen. Schalten Sie Ihr anderes Hörgerät wieder ein.

En quelques secondes, vous voyez une LED verte fixe. Allumez votre autre aide auditive.

Wacht een paar seconden totdat u een groene ononderbroken LED en s chakel vervolgens uw andere hoortoestel in.

Model: Roger On 3

 Sonova Communications AG
Herrenschwandweg 4
CH-3280 Murten
Switzerland

www.phonak.com/roger

sonova
HEAR THE WORLD

UK
CA  

PHONAK
life is on

A Sonova brand


Roger™

RogerDirect™ Setup Guide for Roger On
RogerDirect™ Verbindungsanleitung für Roger On
Guide de connexion RogerDirect™ pour Roger On
RogerDirect™ installatiehandleiding voor Roger On



roger

1

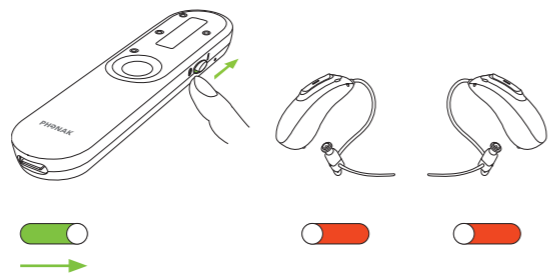


Switch on your Roger On.

Schalten Sie den Roger On ein.

Allumez votre Roger On.

Schakel uw Roger On in.

2

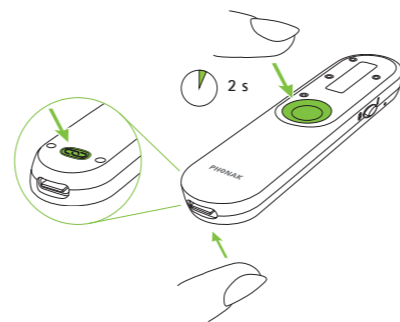


Press and hold the large center button and the small button with the chain icon on the backside for two seconds.

Halten Sie gleichzeitig die grosse mittlere Taste und die kleine Taste mit dem Kettensymbol auf der Rückseite zwei Sekunden lang gedrückt.

Appuyez et maintenez le grand bouton central et le petit bouton avec l'icône de la chaîne à l'arrière pendant deux secondes.

Houd de grote middelste knop en de kleine knop met het kettingpictogram op de achterkant twee seconden ingedrukt.

3

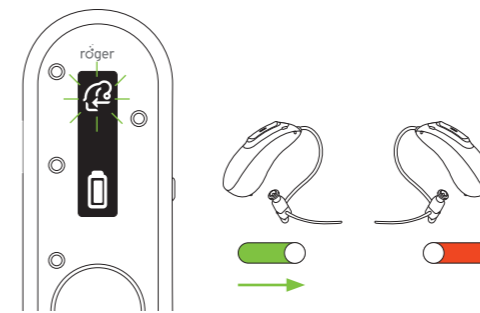


You should see a flashing hearing aid icon. Then switch on your left hearing aid and place it close to Roger On.

Sie sollten nun ein blinkendes Hörgerät-Symbol sehen. Schalten sie nun Ihr linkes Hörgerät ein und legen Sie es nahe Roger On.

Vous devriez voir une icône d'aide auditive clignotante. Allumez maintenant votre aide auditive gauche et placez-la à proximité de Roger On.

U zou een knipperend hoortoestelpictogram moeten zien. Schakel nu uw linkerhoortoestel in en plaats het dicht bij Roger On.

4

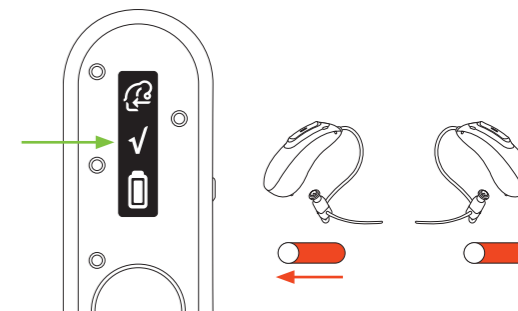

Wait until you see the check on the display. Then switch off your left hearing aid.

Warten Sie, bis Sie das Häkchen unterhalb des Hörgerätesymbols sehen. Schalten Sie Ihr linkes Hörgerät wieder aus.

En quelques secondes, vous voyez la coche sur l'écran. Eteignez votre aide auditive gauche.

Wacht een paar seconden tot u het vinkje op het display ziet en schakel vervolgens uw linkerhoortoestel uit.