


### Korzystanie z funkcjonalności RogerDirect™ w aparacie słuchowym Phonak

**Ważne:** W trakcie procesu instalowania/deinstalowania zaleca się wszystkie urządzenia Roger Installer trzymać w odległości co najmniej 3 m od siebie a pozostałe aparaty słuchowe znajdujące się w ich pobliżu należy wyłączyć. Podczas procesu instalowania, urządzenia Roger znajdujące się w pobliżu Roger Installer'a powinny być wyłączone.


#### Instalowanie odbiornika Roger™ w aparacie słuchowym marki Phonak przy użyciu odbiornika Roger X

- Podłącz odbiornik Roger X do urządzenia Roger Installer (3).
- Włącz urządzenie Roger Installer (1) (wskaźnik świetlny (2) będzie świecić ciągłym zielonym światłem).
- Wskaźnik świetlny (4) świeci ciągłym zielonym światłem (odbiornik Roger X jest gotów do aktywacji).
- Włącz aparat słuchowy i umieść go na logo aparatu.
- Poczekaj, aż wskaźnik świetlny (5) zamruga na zielono (trwa aktywacja). Gdy wskaźnik zacznie świecić ciągłym zielonym światłem, będzie to znaczyć, że aktywacja została zakończona.
- Wyłącz urządzenie Roger Installer. Odłącz odbiornik Roger X i schowaj go. Od teraz możesz korzystać z funkcji RogerDirect w aparacie słuchowym.

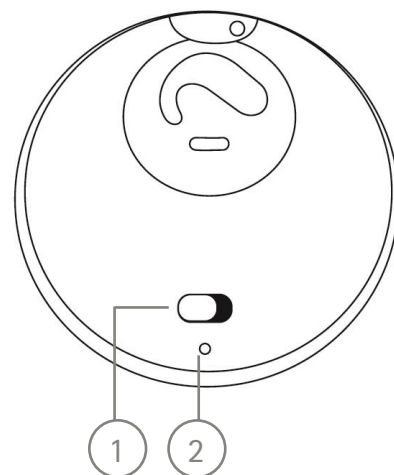

#### Odinstalowanie odbiornika Roger z aparatu słuchowego marki Phonak przy użyciu odbiornika Roger X

- Podłącz odbiornik Roger X do urządzenia Roger Installer (3).
- Włącz urządzenie Roger Installer (1) (wskaźnik świetlny (2) będzie świecić ciągłym zielonym światłem).
- Wskaźnik świetlny (4) będzie przez kilka sekund nieaktywny (odbiornik Roger X jest gotów do odinstalowania).
- Włącz aparat słuchowy i umieść go na logo aparatu.
- Poczekaj, aż wskaźnik świetlny (5) zaświeci ciągłym zielonym światłem (potwierdzenie, że odbiornik Roger jest zainstalowany w tym aparacie słuchowym).

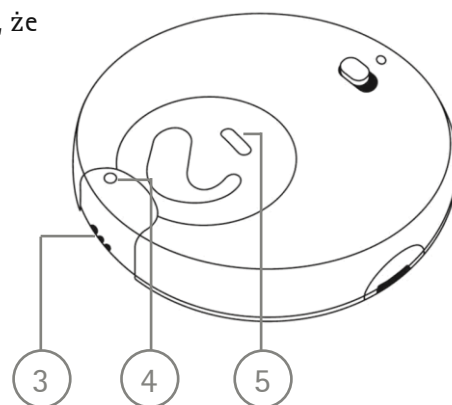

- f. Po rozpoczęciu procesu odinstalowania wskaźnik świetlny (5) będzie mrugać na zielono do chwili ukończenia procesu.
- g. Po zakończeniu procesu odinstalowania wskaźnik świetlny (4) zaświeci ciągłym zielonym światłem (funkcjonalność Roger jest teraz aktywna w odbiorniku Roger X).
- h. Wyłącz urządzenie Roger Installer. Odłącz odbiornik Roger X. Od teraz aparat słuchowy nie może być wykorzystywany z systemem Roger.