

Phonak


Guia de referência

Usar o RogerDirect™ em um aparelho auditivo Phonak

Importante: Recomenda-se manter uma distância de, no mínimo, 3 m entre cada Roger Installer durante a instalação/desinstalação e manter todos os outros aparelhos auditivos próximos do Roger Installer desligados. Recomenda-se que os dispositivos Roger nas proximidades do Roger Installer estejam desligados durante uma instalação.

Instalar o receptor Roger™ em um aparelho auditivo Phonak a partir do Roger X

- Conecte o Roger X ao Roger Installer (3).
- Ligue o Roger Installer (1) (a luz indicadora [2] ficará verde contínuo).
- A luz indicadora (4) fica verde contínuo (O Roger X está pronto para instalação).
- Ligue o aparelho auditivo e coloque-o sobre o seu logotipo.
- Aguarde até que a luz indicadora (5) pisque em verde (a instalação está em andamento); quando a luz indicadora fica verde contínuo, a instalação está concluída.
- Desligue o Roger Installer. Remova e guarde o Roger X. O aparelho auditivo está pronto para uso com o RogerDirect.

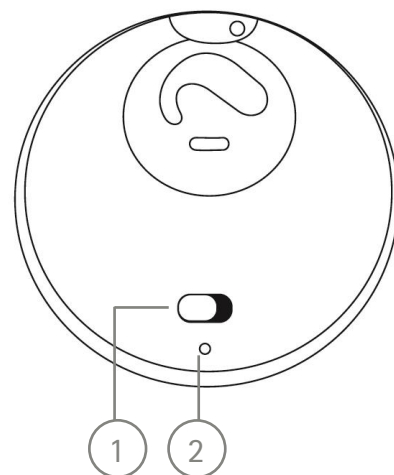

Desinstalar o receptor Roger de um aparelho auditivo Phonak no Roger X

- Conecte o Roger X ao Roger Installer (3).
- Ligue o Roger Installer (1) (a luz indicadora [2] ficará verde contínuo).
- A luz indicadora (4) permanece inativa durante vários segundos (O Roger X está pronto para ser desinstalado).
- Ligue o aparelho auditivo e coloque-o sobre o seu logotipo.
- Aguarde até a luz indicadora (5) ficar verde contínuo (confirma que o Roger está instalado neste aparelho auditivo).
- Quando a desinstalação começar, a luz indicadora (5) piscará em verde até o processo ser concluído.
- A luz indicadora (4) fica verde contínuo quando a desinstalação é concluída (O Roger está agora instalado no Roger X).
- Desligue o Roger Installer. Remova o Roger X. O aparelho auditivo não pode ser mais usado com o Roger.

