

# Phonak CROS P

## Ürün bilgisi



Phonak CROS P, kullanıcının herhangi bir yönden gelen sohbetleri takip\* etmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış, tek taraflı işitme kaybına yönelik bir çözümdür\*\*. CROS P, sesleri almak için desteklenemeyen kulağa takılır ve daha iyi işiten kulağa takılı bir Phonak Audéo™ P işitme cihazına bu sesleri kablosuz olarak iletir. CROS P'nin akustik çıkışı yoktur.

CROS P iki model içerir ve Audéo P-13T, Audéo P-R ve Audéo P-RT işitme cihazlarıyla tüm performans düzeylerinde uyumludur. Daha fazla bilgi almak için şu adresi ziyaret edin: [www.phonakpro.com](http://www.phonakpro.com)

\* Takip: cihazı kullanan kişinin konuşmayı fark ederek ilgisini yöneltebilmesi anlamına gelir.

\*\* desteklenemeyene kıyasla, bir CROS sistemi kullanırken

1. Stewart, E. & Woodward, J. (2021). Out of the (Head) Shadow: A Systematic Review of CROS/BiCROS Literature. The Hearing Review, 28(8), 22-25. 9 Ağustos 2021 tarihinde erişilen <https://www.hearingreview.com/inside-hearing/research/head> adresinden alınmıştır.

Bir Sonova markası

**PHONAK**  
life is on

# Ürün açıklaması



CROS P-R



CROS P-13

Pil boyutu		şarj edilebilir	13
Çok fonksiyonlu düğme		•	•
CROS dengesi		•	•
IP derecesi		IP68 <sup>1</sup>	IP68 <sup>1</sup>
Boyutlar	U x G x D	28,0 x 11,9 x 8,0 mm (1,11 x 0,47 x 0,32")	29,0 x 11,9 x 8,1 mm (1,13 x 0,47 x 0,32")
	Ağırlık	2,1 g (0,07 oz)	1,4 g (0,05 oz)
Şarj süreleri <sup>2</sup>	%0 ila %100	3 saat	
	%0 ila %80	1,5 saat	
	30 dk. fitting	10 dakika	
İşitme cihazıyla uyumluluk		Audéo P-R, Audéo P-RT	Audéo P-13T

## Kabin renkleri



P1  
Kum Beji



H0  
Bej



P3  
Sandal Ağacı



P4  
Kestane



P5  
Şampanya



P6  
Gümüş Gri



P7  
Grafit Gri



P8  
Kadife Siyah

## Kulaklık seçenekleri

Standart dome (CROS Tube)	<ul style="list-style-type: none"><li>Üç boyutta standart dome (S, M, L)</li><li>CROS Tube, sol/sağ olarak ve dört farklı uzunlukta mevcuttur (0, 1, 2, 3)</li></ul>
SlimTip (CROS Tube)	<ul style="list-style-type: none"><li>Özel yapım kulaklık</li><li>CROS Tube, sol/sağ olarak ve dört farklı uzunlukta mevcuttur (0, 1, 2, 3)</li></ul>
CROS Tip	<ul style="list-style-type: none"><li>CROS için tamamen özel yapım kulaklık, dört farklı kablo uzunluğunda mevcuttur (0,1,2,3)</li></ul>

## Phonak CROS P-R şarj cihazı seçenekleri

CROS P-R, bir Phonak Charger Case Combi ya da Phonak Mini Charger Case kullanarak, eşleştirilmiş Audéo P-R veya Audéo P-RT ile birlikte şarj edilebilir.

Daha fazla bilgi almak için lütfen Phonak Audéo P ürün bilgisine bakın.

<sup>1</sup> IP68, işitme cihazının su ve toz geçirmez olduğunu belirtir. IEC60529 standardı uyarınca, sürekli olarak 1 metre tatlı su derinliğinde 60 dakika boyunca ve toz odasında 8 saat boyunca dayanıklılık göstermiştir.

<sup>2</sup> Gerçek şarj süresi kalan pil ömrüne bağlıdır, ancak 3 saati aşmayacaktır.

# Fitting

	CROS P-R	CROS P-13
Phonak Target	7.1.9 veya üstü	7.1.9 veya üstü
Noahlink Wireless	•	•
NOAHLink		•
HI-PRO, HI-PRO2		•

## Kablosuz İletişim Portföyü

Kablosuz aksesuarlar kullanırken, bunlar daha iyi işiten kulaktaki işitme cihazına bağlanacaktır. Bir aksesuardan sinyal geldiğinde, CROS sinyali duraklayacak ve aksesuardan gelen sinyal durur durmaz yeniden devam edecektir. Uyumlu aksesuarların tam listesi için lütfen Phonak Audéo P ürün bilgisine başvurun.

## Ana özellikler

CROS P, her türlü performans düzeyinde Audéo P ile uyum sağlayabilir. Dolayısıyla, CROS P sistemine sahip bir kullanıcının faydalanacağı özellikler temelde Audéo P işitme cihazının performans düzeyine bağlıdır. Lütfen Phonak Audéo P ürün bilgisine veya ek bilgilere bakın.

### StereoZoom

StereoZoom, zorlayıcı gürültülü ortamlarda konuşmayı daha iyi anlamaya yardımcı olabilir<sup>1</sup>. StereoZoom, Premium ve Advanced performans düzeylerindeki işitme cihazları için mevcuttur.

### CROS dengesi

CROS dengesi, CROS cihazı ile işitme cihazı arasındaki ses yüksekliği oranını ayarlar.

### AutoSense OS™ 4.0

AutoSense OS 4.0, kullanıcınızın dinleme ortamını gerçek zamanlı olarak otomatik şekilde algılar. Birden fazla özellikten faydalanmakla birlikte, kusursuz bir dinleme deneyimi sunmak için bu özellikleri doğru şekilde harmanlar.

<sup>1</sup> Stewart, E., Rakita, L. & Drexler, J. (2019). StereoZoom Part 1: The benefit of wirelessly connected narrow directionality in Phonak hearing aids for speech intelligibility. Phonak Compendium, [www.phonakpro.com/evidence](http://www.phonakpro.com/evidence) web sitesinden alınmıştır, erişim tarihi Ağustos 2021

## CROS P performansı

CROS P, StereoZoom ile Yüksek Gürültüde Konuşma programı sunar. Premium ve Advanced performans düzeylerindeki işitme cihazlarıyla birlikte kullanılabilir. CROS P, Standard ve Essential performans düzeyleri için Real Ear Sound ve her yöne yönlendirilebilir mikrofon modlarını sunar. Daha iyi işiten kulakta, CROS P kullanıcıları tüm Paradise özelliklerinden eksiksiz faydalanır.

İşitme cihazı performans düzeyi	CROS P için mevcut mikrofon modları		
	StereoZoom	Real Ear Sound	Omni direksiyonel
Premium	•	•	•
Advanced	•	•	•
Standard		•	•
Essential			•

Daha fazla bilgi almak için lütfen şu adresi ziyaret edin: [www.phonakpro.com/cros-p](http://www.phonakpro.com/cros-p)

Audéo P işitme cihazları hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen şu adresi ziyaret edin: [www.phonakpro.com/audeoparadise](http://www.phonakpro.com/audeoparadise)

## life is on

Phonak olarak, iyi işitmenin aynı zamanda iyi olmak ve hissetmek olduğuna ve hayatı en iyi şekilde yaşamak için gerekli olduğuna inanıyoruz. 70 yılı aşkın bir süredir, herkesin hayatını aktif olarak yaşayabileceği "life is on" bir dünya yaratma tutkusuyla faaliyet gösteriyoruz. Yenilikçi işitme çözümlerimiz, her yaştan ve her dereceden işitme kaybı olan bireylerin sosyal bağlantı kurmaları, zihinsel ve duygusal olarak gelişimlerini sürdürmeleri için tasarlanmıştır.

[www.phonakpro.com](http://www.phonakpro.com)



027-0622-22/V2.00/2021-09/NLG © 2021 Sonova AG All rights reserved