

Phonak

Fast Fact

テレビコネクター

What is it?

テレビコネクターは、ストリーマを身に付けることなく、互換性のあるフォナック補聴器とさまざまなテレビやメディアプレーヤーを直接接続できる使いやすいストリーマです。

AirStream™ テクノロジーにより、あらゆるテレビやステレオシステムから最高級のストリーミング音質をお届けします。



Why use it?

テレビコネクターは、以下を備えています。

- シンプルなプラグ & プレイのソリューション
- Dolby™ 互換性
- 15m の範囲内にいる複数の聞き手へのブロードキャストが容易
- 3つのアクティベーションモード (自動、マニュアル、サイレント) 新たなオン/オフボタンとボリュームボタンによるマニュアルコントロール

How to use it?

テレビコネクターは、optical (TOSLINK、デジタル信号) または 3.5mm ミニジャック (アナログ信号) でテレビなどにプラグインして再生できます。テレビとテレビコネクターが電源オンになっていると、お客様がテレビコネクターから一定の範囲 (15 m) に入るだけで自動的にテレビコネクターからの音声が届いてきます。お客様のご要望に合わせて切り替えを自動にするのか手動にするのかを切り替えることもできます。複数の補聴器と接続するには、テレビコネクターのパ어링ボタンを押します。テレビコネクターから 1 m の範囲内にある補聴器は自動的に接続されます。

テレビコネクターの詳細については、

www.phonakpro.com/tvconnector を閲覧するか、フォナックの担当者にご連絡ください。



Dolby Laboratories のライセンスに基づき製造されています。Dolby、Dolby

Audio、ダブル D 記号は、Dolby Laboratories の商標です。