

Phonak

Fast Facts

ロジャー iN マイクロホンによるロジャー受信機機能インストール

ロジャー iN マイクロホンのご紹介

ロジャー iN マイクロホンは、新しいロジャーマイクロホンです。ロジャー セレクト iN、ロジャー ペン iN は、マーベル補聴器と併用可能です。2つのロジャー受信機機能を2つのマーベル補聴器にインストールできる機能をもっています。マーベル補聴器はロジャー受信機を装着しなくてもロジャーマイクロホンから直接ストリーミングすることが可能になります。


使用のメリット

装用者は、ロジャー iN マイクロホンをマーベル補聴器と併用し、騒音下でも距離が離れていても聴覚パフォーマンスを向上できます。この目立たないデザインのソリューションにより、装用者は、レストラン、職場での会議、学校の行事など騒音の多い環境でも、より良い聞こえが期待できます。

使用方法

最初に、ロジャー iN マイクロホンとマーベル補聴器の電源を入れます。治具（ピンツール）を使ってインストール ボタンを2秒長押しし、ロジャー iN マイクロホンをマーベル補聴器の10cm 以内に近づけます。インストール手順は完全に自動化されており、一連のインジケータライトにより、ロジャー受信機機能がインストールされたことを確認できます。別の補聴器で使用するためにインストールしたロジャー受信機機能を前の状態に戻す必要がある場合は、同じ手順を用いてロジャー受信機機能をアンインストールします。

ピン ツールとインストール ボタン
ロジャー セレクト iN

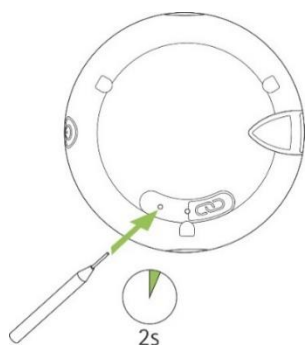

ピン ツールとインストール ボタン
ロジャー ペン iN

