

# Phonak Fast Fact



## フォナック オーデオ B-R

### What is it?

フォナック オーデオ B-Rは、電池を交換する必要がないしっかり保護された充電電池を内蔵した新しい仕様の補聴器です。リチウムイオン電池を使うことで、1回のフル充電で、24時間\*使用いただける仕様になっております。

さらに、新しいハウジングのデザインは、これまで以上に隙間を少なくし防水防塵性能を高めたご安心いただける構造に仕上がっております。



### Why use it?

充電式電池に対する装用者の方のメリットとしては、電池を交換する手間だけでなく、予備の電池を準備するという気を遣わなくて済むことにあります。リチウムイオン電池は、電池本体の経年劣化や自然放電も少なく補聴器のパフォーマンスを十分にご提供できるというメリットもあります。さらに、電池ホルダーをなくした設計は、耐久性を向上させる効果もあります。

フィッティング時には、電池交換やその他の取り扱いの注意事項を説明することに時間を費やす必要がなくなりますので、限られた時間の中でカウンセリングに費やす時間をより多く確保することができるようになります。

### How to use it?

オーデオ B-Rはとても簡単です。補聴器を充電器から取外し、LEDが1回点滅までプログラムボタンを3秒間長押しします。これで補聴器の電源がオンになります。一日の終わりには、補聴器を充電器に戻すだけです。補聴器は充電器のソケットに差し込まれると自動的に電源がオフになり、充電が開始されます。充電中は、LEDが緑色でゆっくり点滅します。LEDの点滅が終わり、点灯に変われば補聴器はフル充電の状態になった合図です。電池を使用しきった状態の補聴器は、約3時間でフル充電になります。

※ フル充電の場合。80分間のワイヤレス機器使用時間を含みます。