

# Phonak Fast Fact



## フォナック ミニチャージャー

### What is it?

ミニチャージャーは、小型でスマートなオーディオ B-R のオプション充電器です。

とても小型でありますので置き場所も気にすることがありません。職場で充電する時や、メインのチャージャーケース RIC の予備用としてご利用いただけます。

### Why use it?

お客様の中には、持ち運びが楽な小型なコンパクト充電器をご希望される方もいらっしゃいます。

ミニチャージャーは、そのようなご要望にお応えできる充電器であります。

### How to use it?

補聴器の充電は、補聴器本体をミニチャージャーの補聴器差し込み口に入れるだけです。補聴器は自動的に電源がオフになり充電が開始されます。充電中は、LED がゆっくり点滅しています。

LED の点滅が終わり点灯に変われば、フル充電が完了し補聴器を使用する準備が整ったことを示しています。電池を使いきった状態からでも3時間で、フル充電が完了します。

