


# Phonak Fast Fact



## レシーバチェック (フォナック オーデオ B)

### What is it?

レシーバチェックは、Phonak Target5.0から加わった機能で、取り付けられているレシーバがフィッティングソフト上で選択されたレシーバと一致しているかをチェックすることができます。音響パラメータの不一致はフィッティング最中では見落としがちで、効果測定や音質をチェックするタイミングでようやく発覚することがあります。レシーバチェックの役割にフィッティングのチェックを促すという点もあります。

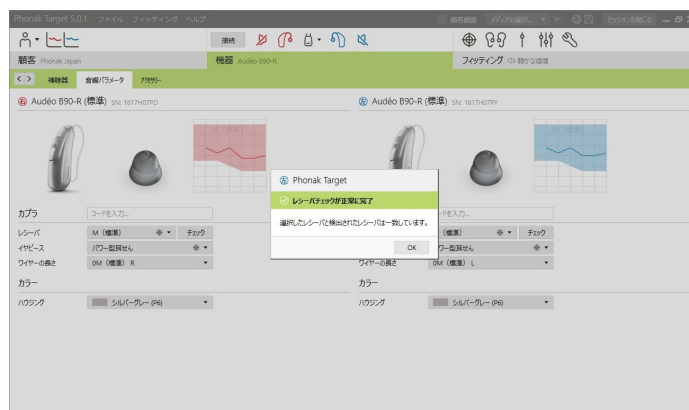

### Why use it?

レシーバチェックは、取り付けられているレシーバとフィッティングソフト上で選択されたレシーバに間違いをなくす手助けをします。

特長：

- 装用者の方により良い音質をお届けするために適切な音響パラメータが選択されていることを担保します。
- レシーバの不一致によるフィッティング時のトラブルをなくし、カウンセリングに使用できる時間を確保できます。

### How to use it?

Phonak Targetにて補聴器を接続されている時はいつでも、チェックすることができます。音響パラメータの画面にある【チェック】をクリックするだけです。

不一致が検知されれば、Phonak Target上にレシーバをチェックしなければならぬとのメッセージが表示されます。もしメッセージが表示されたら、適切なレシーバに交換するかPhonak Target上の選択を変更するだけで完了です。