

アクセサリーのグルーピング方法



お使いの補聴器とリモコン（パイロットワン・パイロットワン II）およびインターフェース（コムパイロット・コムパイロット II・コムパイロットエア II）をグルーピングする方法は以下のとおりです。

1. Phonak Target 上で通常通り補聴器を接続する
2. USB-ミニ USB ケーブルの USB を PC に差す
3. ミニ USB を次のようにアクセサリーに差す

【リモコンの場合】 ※ 電池を抜いておきます

【インターフェースの場合】 ※ グルーピングする前に、十分に充電しておきます



パイロットワン II



コムパイロット II



コムパイロットエア II

4. ケーブルを差すと、自動的に Phonak Target 上で識別される

ケーブルを差すとアイコンが自動的に表示される

識別されるとオレンジ色の【識別】アイコンがグレーになる

選択したアクセサリー

PilotOne II SN: snc-33

識別

SN (シリアル番号) が表示されれば OK!

5. 接続した補聴器と識別済みのアクセサリーを一緒に **セッションを閉じる** から保存をかける