

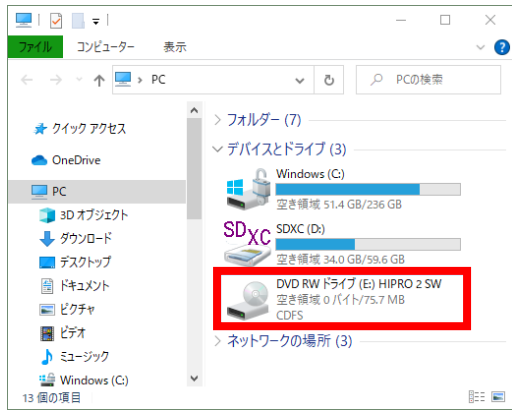

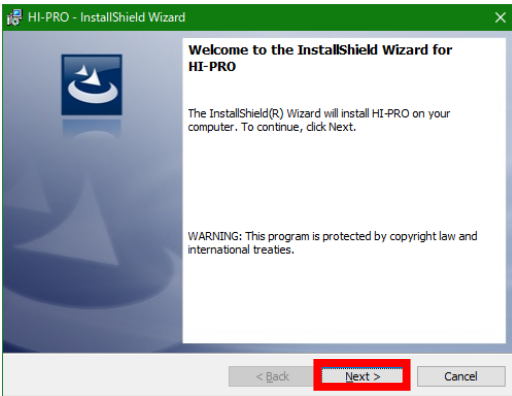
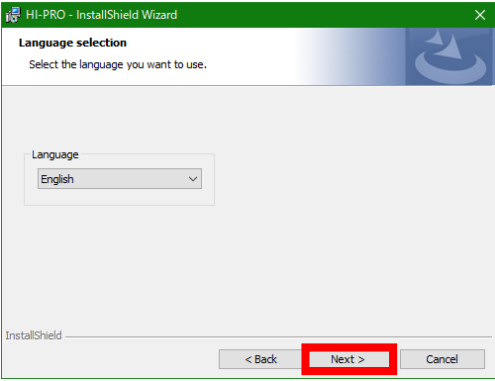
HI-PRO 2 セットアップマニュアル (Windows 10 版)

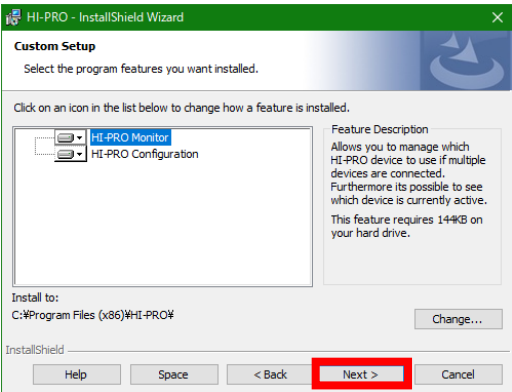
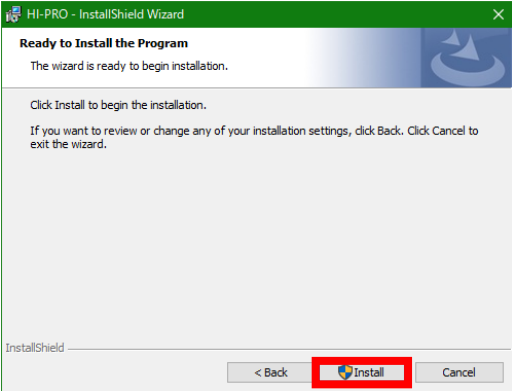

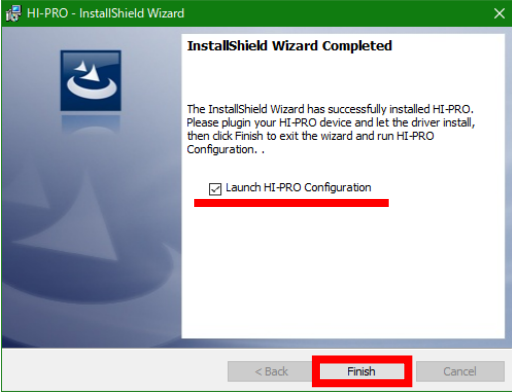
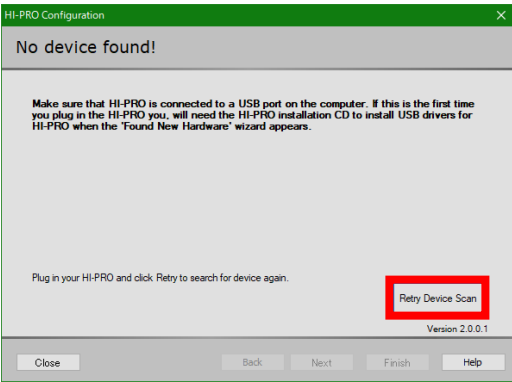
【セットアップ_ステップ1】ドライバーのインストール

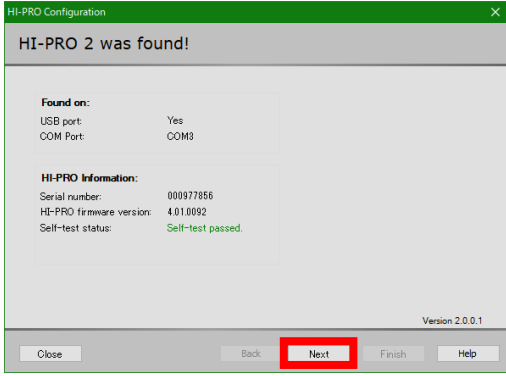
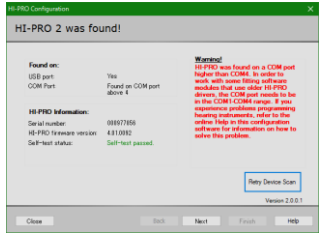
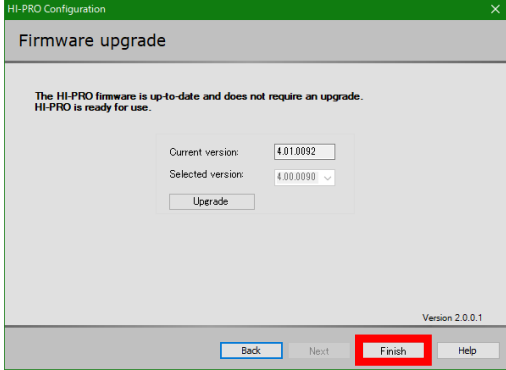
フィッティングインターフェース HI-PRO 2 をお使いいただく前に、ドライバのインストールを行なわなければなりません。

下記の手順に従ってインストールを行なってください。

(注) 指示があるまでパソコンと HI-PRO 2 を接続しないでください。

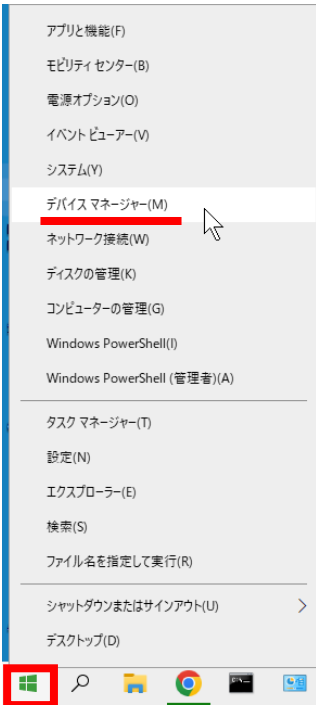
手順	作業	内容	備考
1	HI-PRO 2 に同梱されている『 HI-PRO 2 Software Installation CD 』をパソコンの CD ドライブに挿入し、デバイスとドライブ内の【 DVD RW ドライブ 】をダブルクリックで開きます。 その中の【 setup.exe 】を実行します。		 デバイスとドライブは、スタート→Windows システムツール→PC から入れます。
2	そのまま【 Next> 】をクリックします。		
3	そのまま【 Next> 】をクリックします。		

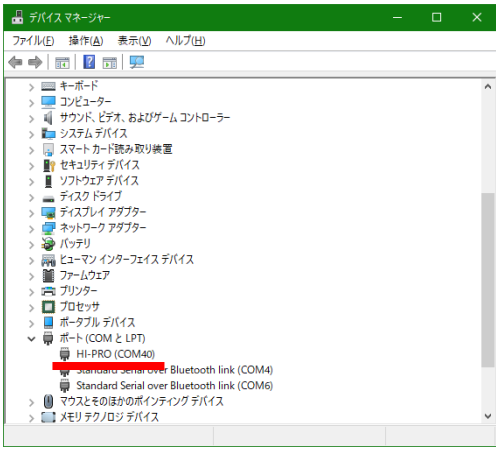
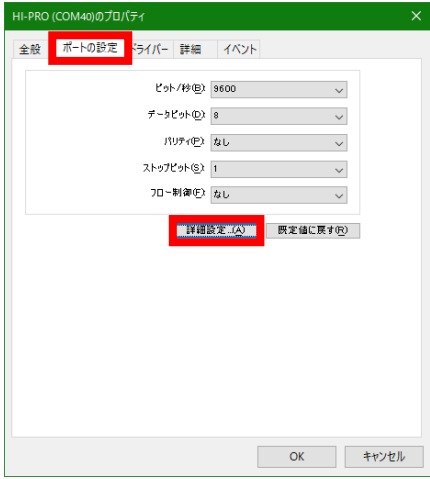
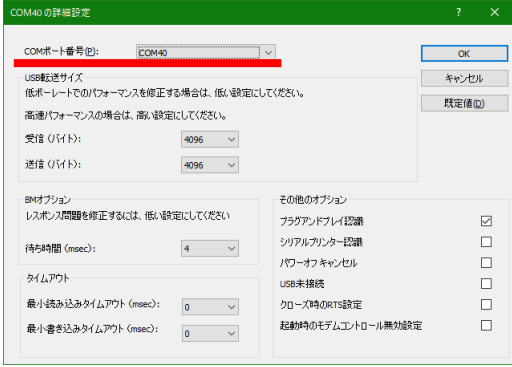
手順	作業	内容	備考
4	そのまま【Next>】をクリックします。		
5	そのまま【Install】をクリックします。		 <p>【Install】をクリックすると上記確認のダイアログが表示されます。 【はい】をクリックし進めてください。</p>
6	【Launch HI-PRO Configuration】にチェックマークを入れて、【Finish】をクリックします。		
7	<p>右の画面が表示されました、 <u>HI-PRO 2 を USB ケーブルを使用して、パソコンに接続してください。</u></p> <p>接続後、しばらくお待ちいただくと、自動的に HI-PRO 2 がパソコンに認識されます。 認識確認後、【Retry Device Scan】をクリックします。</p>		

手順	作業	内容	備考
8	この画面が表示されれば、HI-PRO 2 の接続が確認された結果になります。そのまま【Next>】をクリックします。		 <p>もし上記のような画面が表示された場合は、COM ポートの設定が必要です。 ステップ 1 の作業が完了しましたら、ステップ 2 にお進みください。</p>
9	【Finish】をクリックして完了です。		

【セットアップ_ステップ 2】COM ポートの設定

次に HI-PRO 2 の COM ポートの設定を行います。HI-PRO 2 をフィッティングソフトで使用する場合、必ず COM1～COM4 の間に設定されていなければなりません。下記の手順で、COM ポートを確認し、必要であれば設定変更してください。

手順	作業	内容	備考
1	スタートメニューを右クリックし、表示されたメニューの中から【デバイス マネージャー】をクリックします。		

手順	作業	内容	備考
2	<p>デバイスマネージャーが表示されます。</p> <p>【ポート (COMと LPT)】を展開し、その直下にある【HI-PRO (COM*)】を右クリックし、【プロパティ(R)】をクリックします。</p>		
3	<p>【HI-PRO (COM*)】が表示されます。</p> <p>【ポートの設定】のタブを開き、その中にある【詳細設定…(A)】をクリックします。</p>		
4	<p>【COM ポート番号(P):】を変更します。</p> <p>HI-PRO 2 を使用するために必要な COM ポートは、COM1～COM4 までとなりますが、COM1 もしくは COM2 に設定していただくことをお勧めします。</p>		<p>COM ポートの設定が終わりましたら、表示されているすべてのウィンドウを【OK】を押して閉じてください。(【OK】がないウィンドウの場合は【×】マークで閉じてください)</p>

フィッティングソフト Target、iPFG、PFG ともに HI-PRO 2 にてフィッティングすることは可能です。それぞれのフィッティングソフトの中の設定で【HI-PRO】を使用できるように設定ください。また、もし HI-PRO 2 ドライバソフトウェアのインストール前に HI-PRO 2 をパソコンと接続させてしまい、適切にハードウェアの設定ができていない場合、ステップ 1 の手順 7 以降が手続きできない場合があります。その場合、不明なハードウェアを削除してからステップ 1 の手順 7 以降に進んでください。