

## ステップ 1



- Phonak Target 6.0.2 を起動します。
- ① <トライアルとツール> タブを開きます。
- ② <トライアル補聴器> を開きます。
- ③ 【設定中】をクリックします。

使用するフィッティング機器を選択します。  
補聴器の電源を入れ直します。  
④ 【続行】をクリックして進みます。

## ステップ 2



- 接続した Trial 機器が表示されます。
- ⑥ クラス変更する補聴器を選択します。
- ⑦ 【続行】をクリックします。

※ 器種の確認は多機能ボタンを押すと、押した側の補聴器が緑にハイライトされます。


- クラス変更は 1 台ずつ行いますので、片耳のクラス変更が終わったら、もう片耳も同じ作業を行います

## ステップ 3



- 利用可能なクラスが表示されます。
- ⑧変更したいクラスの【選択】をクリックします。
- ⑨【続行】をクリックします。

約 90 秒~120 秒間で  
書き換えが完了します  
⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

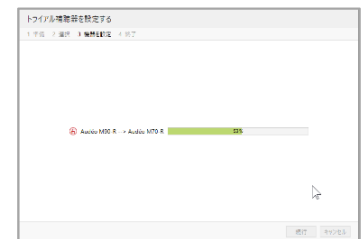

## ステップ 4



- クラス変更が正常に終了しました。
- ⑩【閉じる】をクリックします。
- 新しいクラスの補聴器を新しいセッションからファーストフィットを行ってください。

※ ファーストフィットで補聴器を接続する時も、補聴器の電源を入れ直してから【接続】をクリックしてください！