

# Windows 10 上での NOAHlink および Ezurio Bluetooth アダプタの設定方法

Windows 10 上で NOAHlink を使用する際は、下記の順序で作業を行ってください。

1. Ezurio Bluetooth アダプタを取り付ける（Bluetooth 内蔵型 PC の方は不要）
2. NOAHlink をペアリングする
3. 最新バージョンの NOAHlink プロパティをインストールする

以下にそれぞれの手順を記します。

## 1. Ezurio Bluetooth アダプタを取り付ける

❗ Bluetooth が内蔵されている PC の場合、Ezurio Bluetooth アダプタは必要ありません。手順 2 に進んでください。

Windows 10 では、Ezurio Bluetooth アダプタのドライバは標準でインストールされており、CD-ROM からのインストールは必要ありません。Ezurio Bluetooth アダプタを USB ポートに差すだけで、プラグ&プレイにより自動的にインストールされます。ただし、古いバージョンの NOAHlink ソフトウェアをインストールした場合、Windows 10 と互換性のない Ezurio ドライバがインストールされる可能性があります。そのような場合は、予めこれをアンインストールしてください。



Windows Vista および Windows 7 では、デフォルトで Bluetooth の通知は表示しないように設定されています。



Bluetooth ドライバが正常に動作していても、タスクトレイに Bluetooth アイコンが常時表示されない場合がありますが、これは異常ではありません。Windows 10 ではコントロールパネルの[ハードウェアとサウンド]でお使いの Bluetooth の設定を確認することができます。



Bluetooth アダプタが利用可能かどうかは、スタートメニューから[Windows システムツール]> [コントロールパネル]> [ハードウェアとサウンド]> [デバイスとプリンターの表示]をクリックし、デバイス一覧を確認します。Bluetooth アダプタが正常インストールされている場合、「デバイス」の中に「例：Turbo Bluetooth Adapter」と表示されます。

※ Ezurio アダプタが正しく取り付けられているのに、Bluetooth アダプタが表示されない、またはエラーが表示される場合は、Ezurio ドライバのインストールに失敗している可能性があります。

## 2. NOAHlink をペアリングする

NOAHlink の電源がオンになっていることを確認します。



デスクトップ右下の  を左クリックし、Bluetooth  のアイコンを右クリックして「Bluetooth デバイスの追加」を選択します。

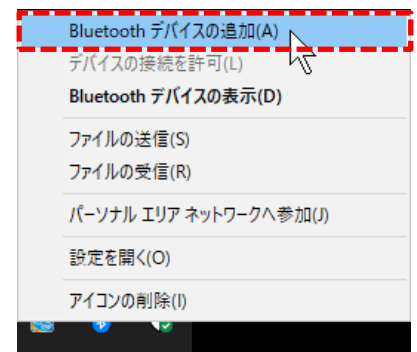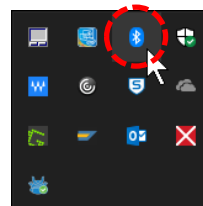

※ アイコンが無い場合、[設定]> [デバイス]> [Bluetooth とその他のデバイス]> [その他の Bluetooth オプション]> [オプションのタブ]> [Bluetooth アイコンを通知領域に表示する (N)] に✓を入れると、デスクトップ右下に表示されます。

[Bluetooth またはその他のデバイスを追加する]の  
左にある **+** をクリックします。

**Bluetooth** をクリックすると追加可能なデバイスが  
表示されますので追加したい NOAHlink をクリック  
します。

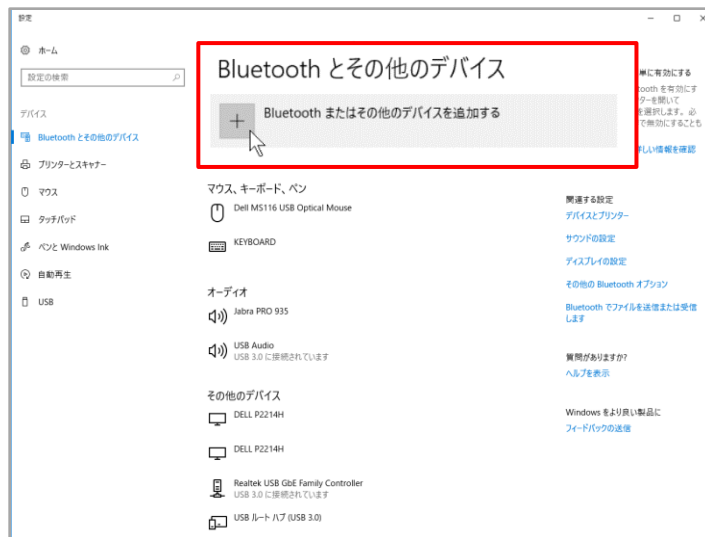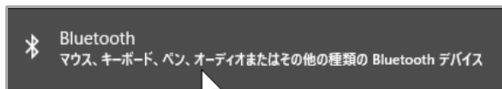


検出された機器をクリックします。

PIN コード「**1234**」を入力し **【接続】** を  
クリックします。

正しく接続されると「**ペアリング済み**」と  
表示されます。

これでペアリングは完了です。

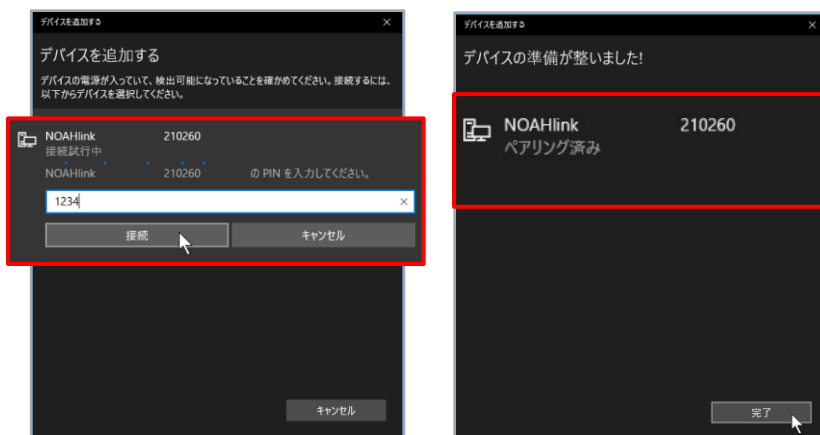


「Bluetooth とその他のデバイス」画面の「その他の  
デバイス」にペアリングした NOAHlink がペアリング  
済みと表示されます（右図）。




### 3. NOAHlink プロパティのインストール

インストール後、NOAHlink プロパティを起動します。

 をクリックし、メニューから「NOAHlink」を選択し、その中にある「NOAHlink properties」をクリックします。

- ※ NOAHlink プロパティが見つからない場合、インストールされていない可能性があります。Phonak Target の DVD からインストールすることが可能です。

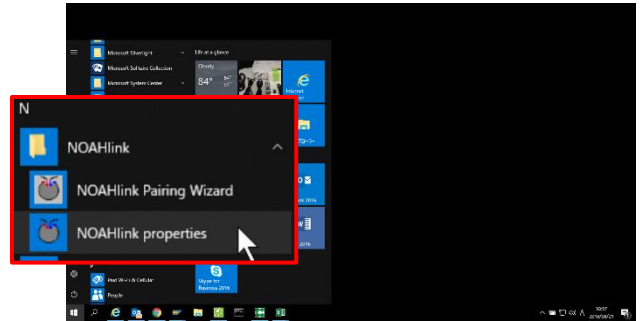

–Phonak Target からアクセス方法–


Phonak Target>Support>HIMSA>Noahlink>Noahlink Properties…>Installation>setup

NOAHlink プロパティを起動後、【検索】をクリックします (①)。


- ※ 以前に接続していた場合、既知と表示されていることがありますが、そのまま検索をしてください。



状態が「利用可能」になったら、表示されている NOAHlink を選択し、【接続】をクリックします (②)。

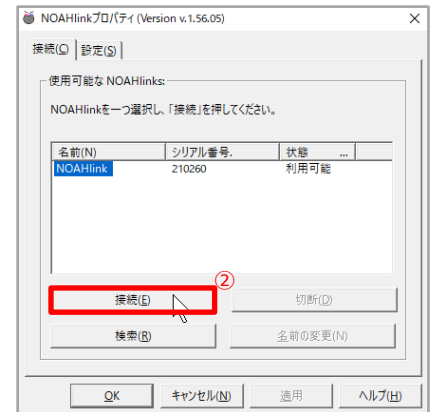


状態が「接続済み」になったら、NOAHlink はもう使用できる状態です。

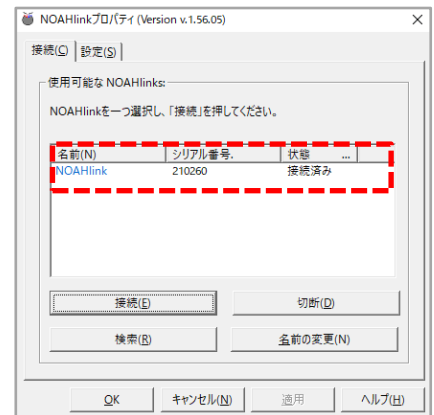

NOAHlink (カーネル) のファームウェアが最新であるか確認しておくことをお勧めします。


NOAHlink プロパティの「設定」のタブをクリックします。

右下の【高度な設定】をクリックします。

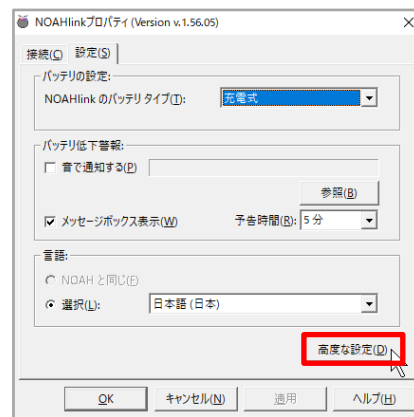


「バージョン」のタブをクリックし、カーネルのバージョンを確認します。


最新でない場合は、【カーネルのアップグレード】を押します。

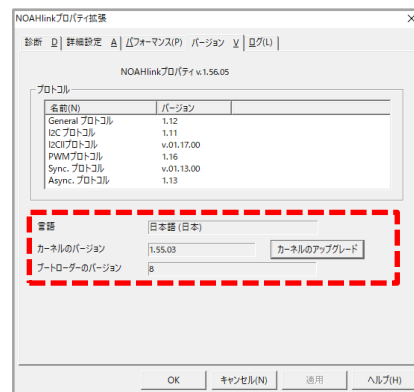

「バッテリーに関する警告」画面の【続行】をクリックして進みます。

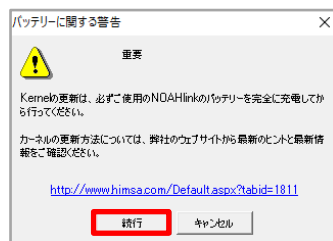

プルダウンをクリックして新しいバージョンが表示された場合、それを選択し、アップグレードを行います。【終了】をクリックします。

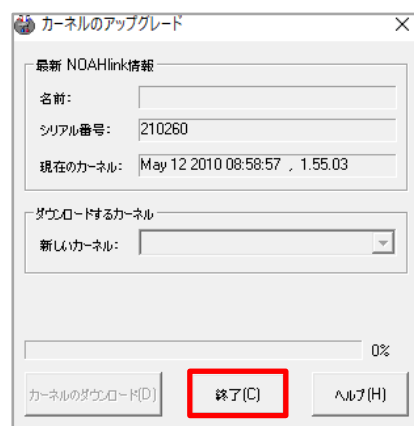

## 補足 1 : NOAHlink の使用可能チェック

ペアリングを終了した NOAHlink が、フィッティングソフトで使用可能か確認しておくことをお勧めします。

Phonak Target を起動させます。「セットアップ」のページを開き (1)、「フィッティング機器」に移動し (2)、NOAHlink を選択します (3)。

橙色の【チェック】ボタンをクリックします (4)。



NOAHlink が使用可能であれば、デバイス情報が表示されます（右図）。  
この状態であればフィッティングソフト内での使用が可能です。




## 補足 2 : トラブルシューティング

上記の手順を行ったにも関わらず、NOAHlink プロパティで検索ができない場合は、下記を参照に NOAHlink が使用する COM ポートの設定を行ってください。


### ➤ 「デバイスとプリンターの表示」を開く


1 または 2 の方法でアクセスすることが可能です。


1. 【Windows】キーと【x】キーを押し、「設定」をクリックします。

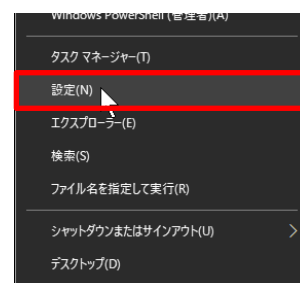

「デバイス」を開き、画面内にある「デバイスとプリンター」をクリックします。

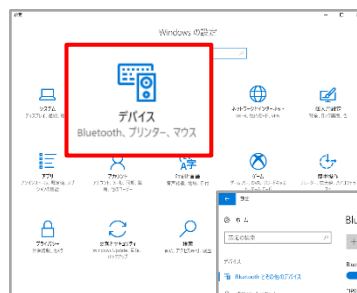


2.  ボタンを押し、メニューから「Windows システムツール」を開き、コントロールパネルを開きます。

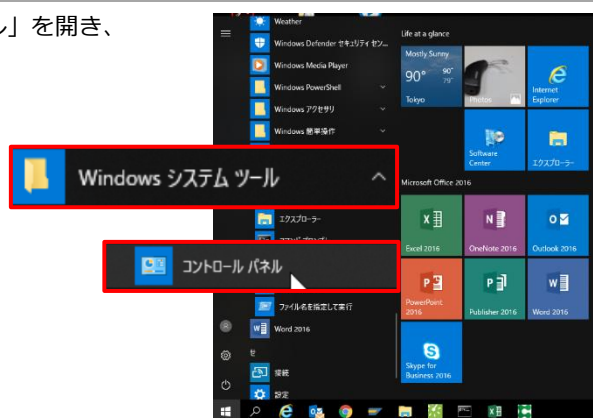


「ハードウェアとサウンド」から「デバイスとプリンターの表示」を開きます（表示方法がカテゴリの場合）。



接続中の他の機器と共に、先ほどペアリングした NOAHlink が表示されています。NOAHlink 上で右クリックし、「プロパティ」を開きます

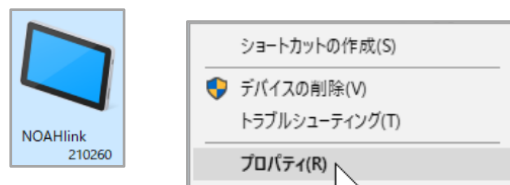


「サービス」のタブを開き、Bluetooth シリアルポートが使用する COM ポート番号を確認します。

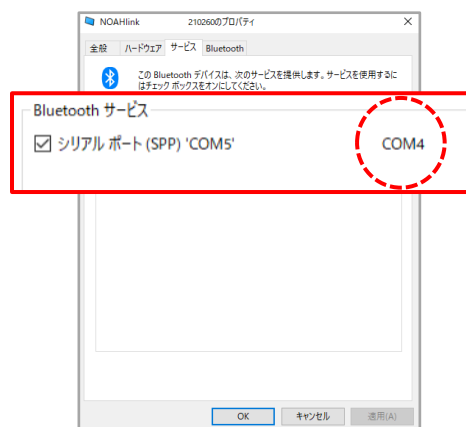

NOAHlink プロパティをもう一度開き、設定のタブから【高度な設定】を選択します（4 ページ上部を参照）。

「詳細設定」のタブにある COM ポート設定を確認し、高ポート番号の数が先ほど確認した NOAHlink が使用する COM ポート番号と異なる場合は同じ番号に合わせます。

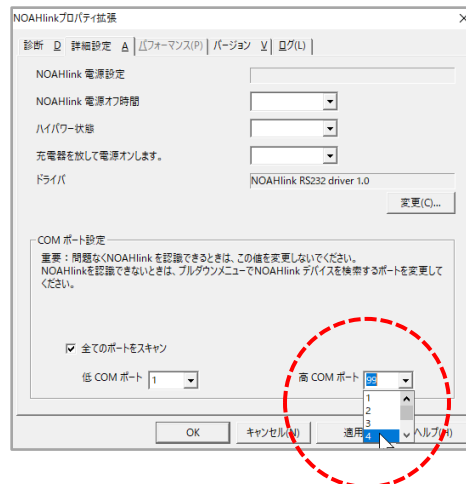

その後、NOAHlink プロパティに戻り、再度検索を行います。

一覧に NOAHlink が表示されたら接続し、NOAHlink プロパティを終了します（3 ページ目と同じ作業）。