

マイフォナック アプリ リモコンクイックガイド



本ガイドでは、弊社マイフォナック アプリ(myPhonak)の概要とペアリング方法について説明しています。

1. マイフォナック アプリのダウンロード

マイフォナック アプリは、お使いのスマートフォンからマイフォナック アプリをダウンロードして、フォナック マーベル補聴器のリモコンとしてご利用いただくことが可能です。Bluetooth®が搭載されたスマートフォンとペアリングしてご使用ください。

注意: マイフォナック アプリの初期設定をする前に、
お使いの補聴器をご購入いただいた販売店にて
予め調整しておく必要があります。

互換性情報

iPhone:
iPhone 5s 以上で、iOS 10.2 以上

Android:
Android OS が 6.0 以上


端末に搭載された Bluetooth®のバージョンが 4.2 以上
(マイフォナック アプリでは Bluetooth LE を使用します)

◆ 操作用語説明



タップ

スマートフォンの
画面を軽く指先で
触れる

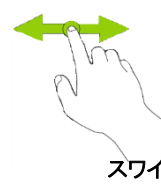

スワイプ

スマートフォンの
画面を軽く指先で
はらう

◆ マイフォナック アプリのダウンロード先はこちら↓



iOS 用



Android 用

2. スマートフォンの Bluetooth®設定

マイフォナック アプリで設定を行う前に、お使いのスマートフォンの Bluetooth®設定画面で補聴器を検索 & 接続してください。

① Bluetooth®のペアリングモード方法

充電タイプの場合(例:Audeo M-R)



Bluetooth®ペアリングをする場合、補聴器を
チャージャーケースから取り外すと自動的に
電源オンになり、ペアリングモードになります。

空気電池タイプの場合(例:Audeo M-312)



Bluetooth®ペアリングをする場合、補聴器の
電池ホルダーを開閉すると、ペアリングモード
になります。


【Bluetooth®ペアリングの手順(iPhone を使用した場合)】

1. スマートフォンの Bluetooth®設定画面を開きます。
2. オーデオ M をペアリングモードにします(左図参照)。
3. Bluetooth®をオンにして Bluetooth®機器を検出します。
あらかじめ調整ソフトで設定した側(例:右-Phonak 補聴器)が
検出画面に表示されたらタップして選択します。
4. 接続に成功すると「接続」または「接続済み」と表示されます。

※ お使いのスマートフォンによって Bluetooth®設定画面および表示が異なります



3. リモコン画面

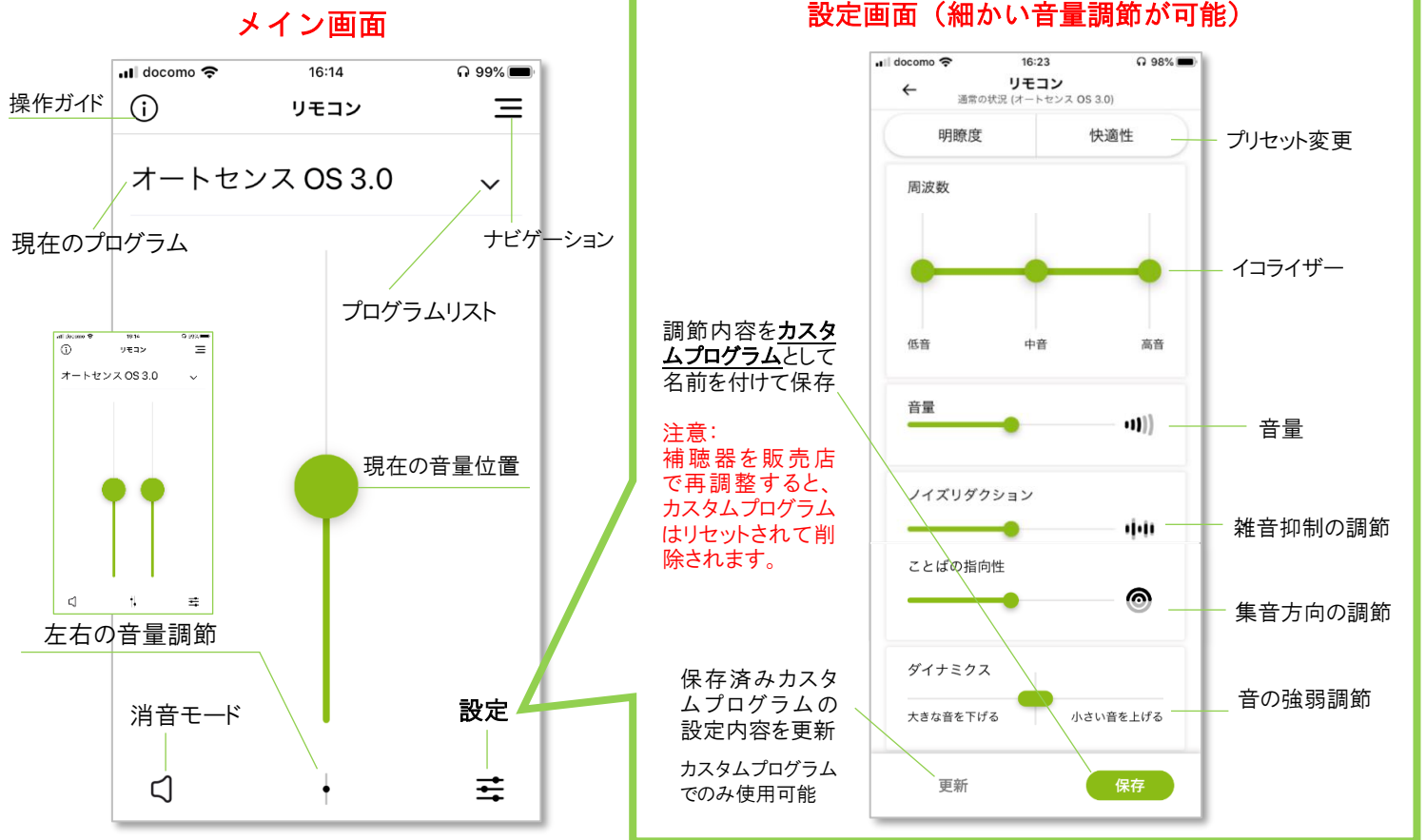

4. リモコン詳細説明

詳細画面では、ユーザー本人が実際に補聴器から音を聞きながら自分好みの聞こえに音量調節することができます*

*** 補聴器販売店で行う補聴器の微調整とは異なります。**

メイン画面:

操作ガイド	リモコンの使い方を簡単な動画で説明しています。
ナビゲーション	マイフォナック アプリで使用できるメニューが一覧になっています。
現在のプログラム	現在補聴器が使用しているプログラム名です。
プログラムリスト	ご使用中の補聴器に設定されているプログラム一覧です。▼をタップしてプログラムを選択できます。
現在の音量位置	現在ご使用中の補聴器の音量位置です。このスライダーを上下することで音量が変わります。
消音モード	ミュートになります。
左右の音量調節	左右別に音量調節を行う場合、ここをタップすると1本のスライダーが2本のスライダーに増えます。
設定	ユーザー自身で好みの聞こえに設定できる画面が開きます。

詳細画面:

プリセット変更	予め用意された 明瞭性 (音の可聴性を重視)と 快適性 (音の自然性を重視)を選択できます。
イコライザー	音の高さを3つの周波数(低域・中域・高域)に分けて調整することができます。
音量	全体の音量調節です。
音の調節(雑音抑制) ノイズリダクション	雑音抑制の強さを調節します。スライダーを右にすると雑音抑制機能が強まり、左にすると弱まります。騒がしい環境で強めると雑音がより抑えられます。
音の調節(集音方向) ことばの指向性	補聴器のマイクロホンが集音する範囲を調節します。スライダーを右にすると指向性がより強まり(前方にフォーカスした集音パターン)、左にすると指向性がより弱まります(全方向にフォーカスした集音パターン*)。 * プログラムによっては全方向にならないものもあります
ダイナミクス	音の強弱を調節します。スライダーを右にすると小さい音の音量が上がり、左にすると大きな音の音量が下がります。初期設定は真ん中に設定されています。
更新	保存済みカスタムプログラムをさらに調節し、その設定内容で引き続き利用したい場合に使用します。
保存	この設定内容を新たなカスタムプログラムとしてプログラム一覧に加えたい場合に使用します。

5. マイフォナック アプリの設定

スマートフォンにマイフォナック アプリをインストールして初めて起動する際、①～③が表示されます。

①



初めてアプリを起動すると、上記画面が表示されます。

「次へ」をタップして進みます。

②



マイフォナック アプリのガイドを見たい方は「次へ」をタップして③へ進みます。

すぐにアプリを始めたい方は「スキップ」をタップして④へ進みます。


③



マイフォナック アプリのガイドが表示されます。このウィザード内で「次へ」をタップすると順に説明画面に移動します。

最後まで進んだら「完了」タップしてガイドを終了します。

④

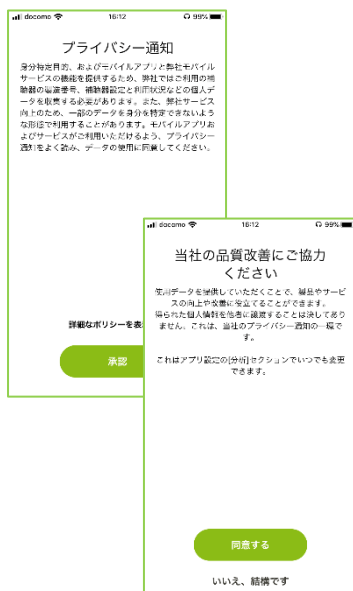

プライバシーポリシーに関する表示です。詳細内容を確認し「承認」をタップして進みます。


次に品質改善のプライバシー通知に関する表示が出ます。詳細内容を確認し、選択肢をタップします。

⑤




補聴器の電源入切(チャージャーケースの抜き差しまたは補聴器の電池ホルダーの開閉)を行ってから「続ける」をタップします。

⑥

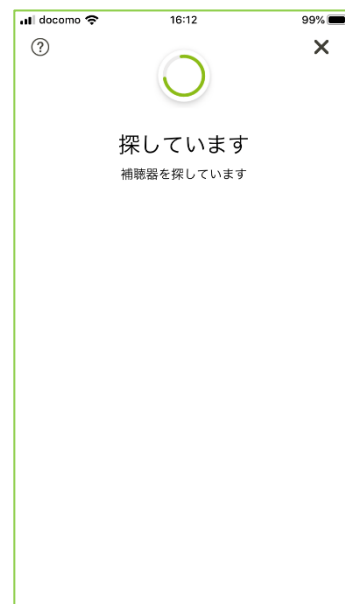

補聴器を検出中です...

⑦

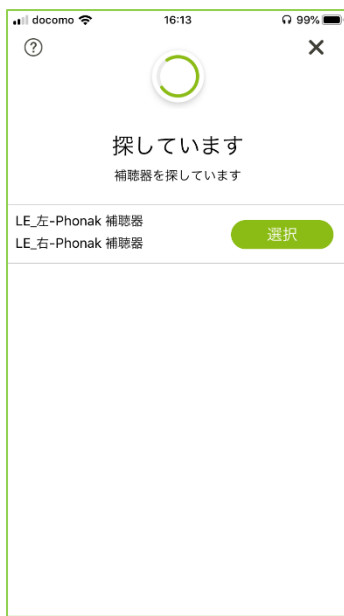

登録名が表示されます。

登録名の初期設定：
(フィッティングソフトで変更可能)

- ◆ LE_左-Phonak 補聴器
- ◆ LE_右-Phonak 補聴器


「選択」をタップしています。

⑧




ペアリングしています...

Bluetooth®ペアリングの要求の「ペアリング」をタップします。

接続されると  と補聴器からお知らせ音が提示されます。この Bluetooth ペアリング作業は片耳ずつ行います。

⑨

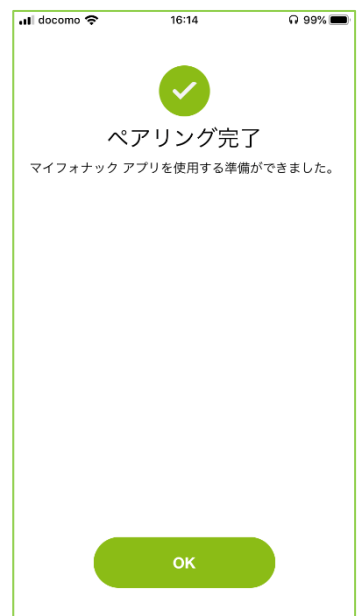


ペアリング完了です。

「OK」をタップしてリモコンのメイン画面へ進み、実際にリモコンを使ってみましょう。

6. 音量調節とプログラム変更


リモコンのメイン画面では、主に音量調節とプログラム変更を行うことができます。

充電タイプ

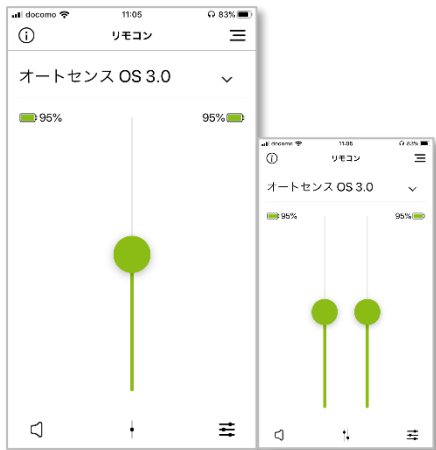


画面上部に充電残量が表示されます。


空気電池タイプ

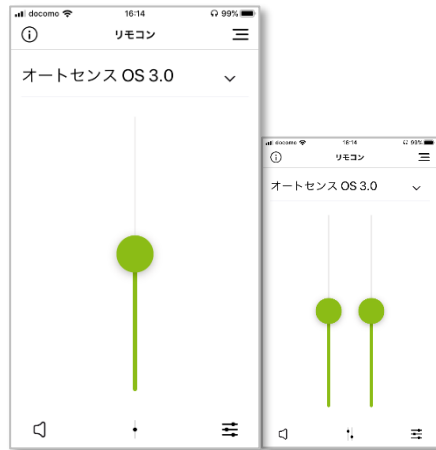

● をタップすると、左右別に音量調節できます。

プログラム変更

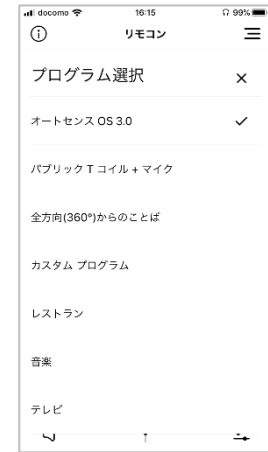


メイン画面に表示されたプログラム横の  をタップすると、補聴器に登録された全プログラムが表示されます。

7. 予め用意された3つの環境別プログラム


マイフォナック アプリでは、予め3つの環境別プログラムが用意されています。

- レストラン・・・「騒音下でのことば」ベース
- 音楽・・・「音楽」ベース
- テレビ・・・「静かな環境」ベース

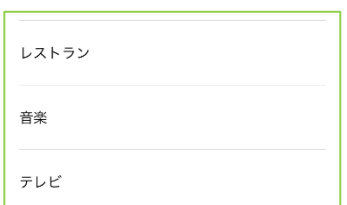

8. テレビコネクターD、パートナーマイクからのバランス調節

マーベル補聴器専用アクセサリ「テレビコネクターD」または「パートナーマイク」を使用する際、テレビ(表記名:テレビコネクター + マイク1)またはマイク(表記名:パートナーマイク + マイク1)からの音声と、補聴器からの音(表記名:テレビまたはマイク)のバランス調節をマイフォナック アプリで行うことが可能です。

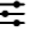
予め補聴器をアクセサリとペアリングしておきます。
(アクセサリのペアリング方法は取扱説明書をご参照ください)
アクセサリの使用中に限り、アプリ画面上の設定  をタップすると表示されます。

初期設定はいずれも中央に位置付けられています。

テレビ/マイクの方向にスライダーをスワイプしていくと、
テレビ/マイクからの音声が大きくなり、補聴器からの音が減衰します。


逆に、周囲の方向にスライダーをスワイプしていくと、
補聴器からの音が大きくなり、テレビ/マイクからの音声が減衰します。

補聴器を電源入切しない限り、設定したバランス調節の内容は保持されます。

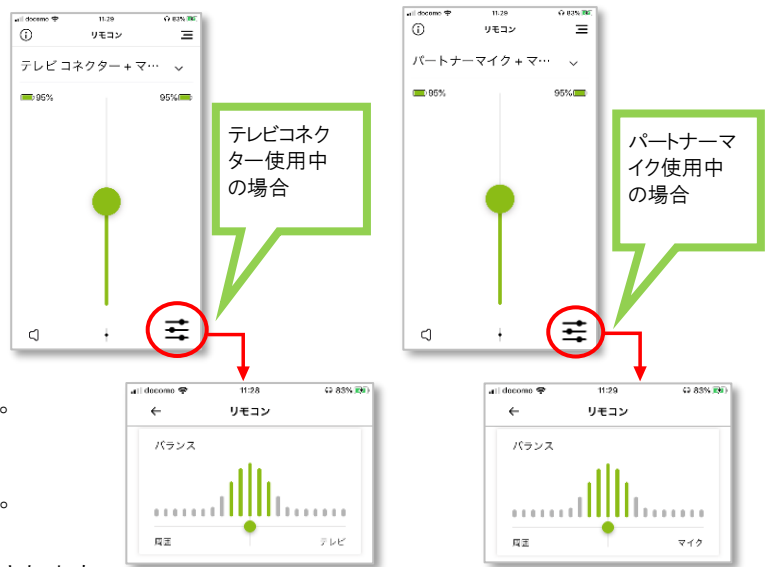

9. ペアリングが切れてしまったら・・・

使用状況或使用機器の状態によっては、ペアリング状態が切れてしまうことがあります。

通常、マイフォナック アプリを再開する場合、補聴器の電源がオンになっていれば画面上で自動再接続をし「接続しています」→「接続しました」の文言とともに、 マークがつかます(Bluetooth®はオンにしておきます)。


「接続しました」に変わらない場合:

検出を繰り返し行っている場合、下記を実行します:

- 補聴器の電源入切
 - ア)充電タイプはチャージャーケースの抜き差し、
 - イ)空気電池タイプは電池ホルダーを開閉を行い、「接続しました」に変わるか試します。


これで接続されない場合、Bluetooth®のペアリングが切れてしまっている可能性があります。

【再ペアリングの手順】


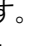
- ① メイン画面右上の  マークをタップします。
- ② メニュー欄「自分の補聴器」をタップします。
- ③ 「機器を削除する」をタップします。
- ④ 「はい、削除します」をタップします。これで削除されました。
- ⑤ 本ガイド 3 ページの⑤～⑨に従い、再度ペアリングを行ってください。

接続時/未接続時の通常動作

接続時

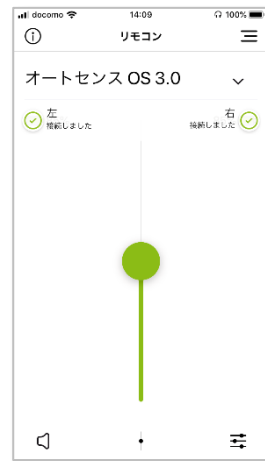

未接続時

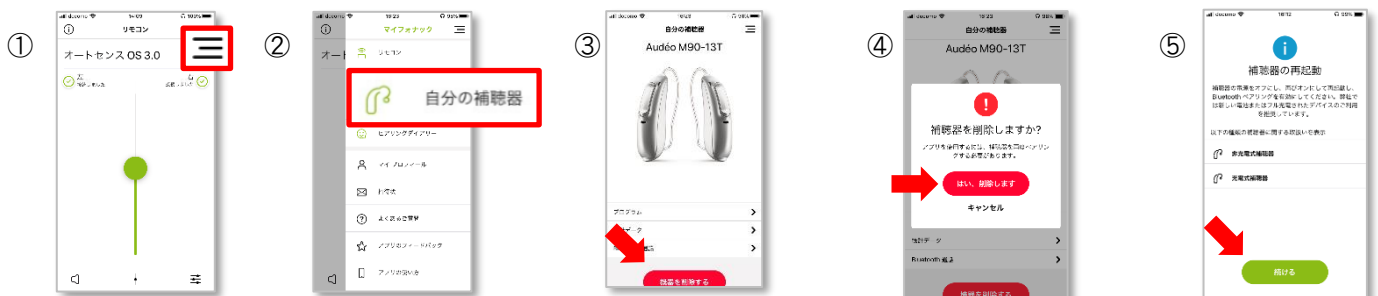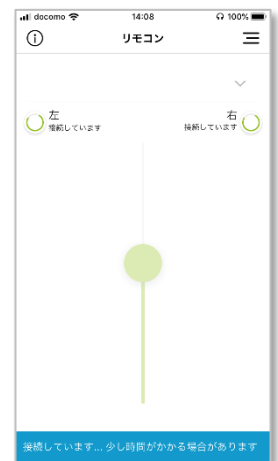

※ 問題が改善されない場合、ご購入いただいた販売店にて補聴器のBluetooth®のペアリング内容をリセットしてください。