




はじめに
お読みください

フォナック クイックガイド

耳かけ型
(充電式)

■ 準備するもの

1. 補聴器

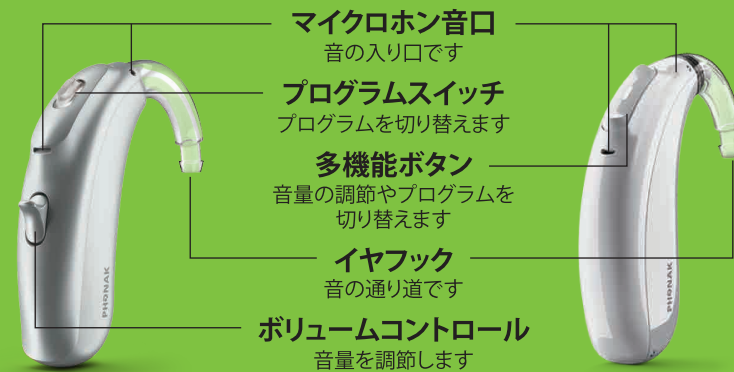

2. 充電ケース



ステップ 1

充電をしましょう！ 写真はチャージャー BTE RICの使用例です。




ステップ 2

補聴器を耳につけてみましょう！



ステップ 3

使用(練習)してみましょう！

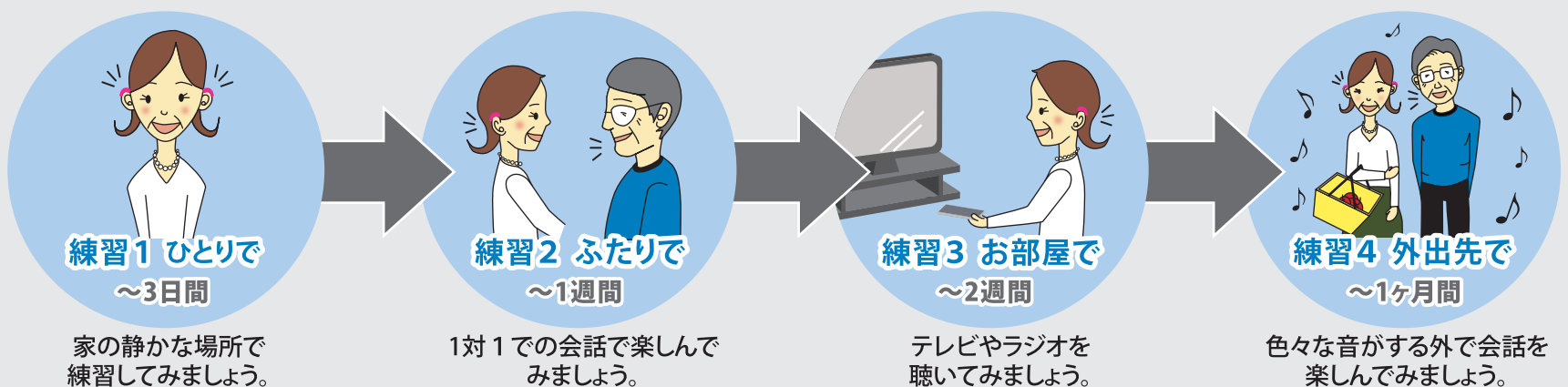

耳かけ型(充電式) - お手入れ -

お手入れ 1

お掃除の仕方


補聴器を長くお使いいただくために、日ごろからのお手入れをおすすめします。

毎日のお掃除編



1

柔らかい素材の布で表面の汚れをふき取ります。

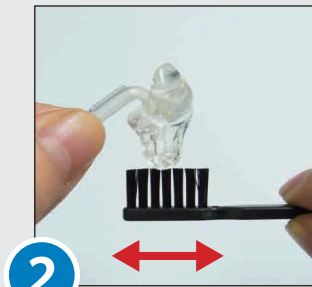

2

音の出口を下に向けブラシをかけて、耳垢等を払い落とします。

防水防塵IP68補聴器 ご使用の注意点

【こんな時には使わないでください】

- × 強い水流や強い水圧がかかるような場合
(サーフィン、ジェットスキー等の海のアクティビティ、洗濯機、超音波洗浄機など)
- × 高温もしくは低温の環境条件の場合
(サウナでの使用、車のダッシュボードに置く、冷蔵庫の中での保管、ドライヤーの温風)
- × 整髪や散髪の時
(整髪料、ヘアスプレーの付着など)

月に1〜2度編

より衛生的にお使いいただくためには、月に1〜2度はイヤモールドを洗浄しましょう!



1

イヤモールド洗浄剤を1粒、袋から出します。



2

イヤモールド洗浄カップの中に洗浄剤を入れます。



3

内ケースを置いてから、カップに150mlの水を入れて、イヤモールドも入れます。

この時蓋は閉めないでください。

洗浄剤は5〜6分ほどで水に溶けてなくなりますが、イヤモールドはそのまま15分以上浸け置きください。ただし、8時間以上の浸け置きはおやめください。



4


イヤモールドは水洗いし、水気を拭き取ります。チューブの中の水は、エアパフアーを使って吹き飛ばしてください。

お手入れ 2

保管の仕方

補聴器にとって湿気は大敵です。特に夏場は外気の湿気から補聴器を保護するためにもドライカプセルをお使いください。


チャージャー BTE RIC の場合

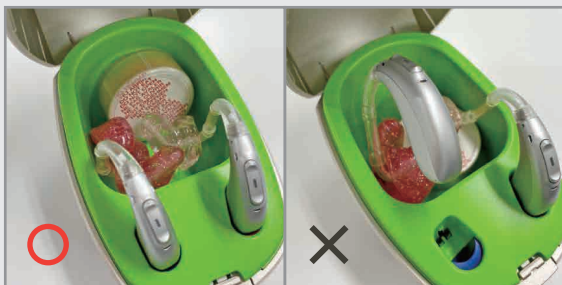

ドライカプセルを裏面シールを剥がさずに縦にして耳せん収納部に入れ蓋を閉めます。

ドライカプセルが耳せんの下にあると補聴器が浮いて充電されない場合がありますのでご注意ください。

チャージャー Combi BTE/2 の場合

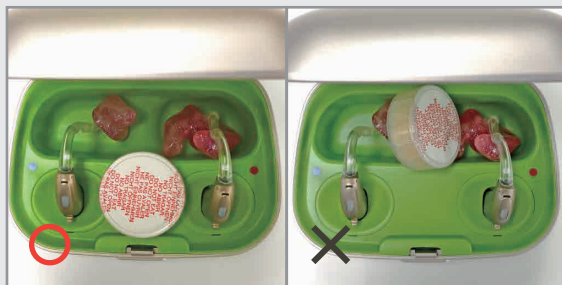

ドライカプセルを裏面シールを剥がさずに写真の位置に入れ蓋を閉めます。

ドライカプセルを耳せん収納部に置くと蓋が閉まらなくなるのでご注意ください。

ドライカプセル(乾燥剤)の交換時期



○

ドライカプセルが新しいときは鮮やかなオレンジ色。



×

くすんで半透明に変わったら、ドライカプセルの交換時期。



エアパフアー
924円(税込)



イヤモールド洗浄剤(20粒入)
924円(税込)



イヤモールド洗浄カップ
924円(税込)



ドライカプセル
1,111円(税込)

ソノヴァ・ジャパン株式会社
〒140-0002 東京都品川区東品川 2-5-8 天王洲パークサイドビル
TEL: 0120-06-4079
(お客様相談窓口 受付時間: 月~金 9:00~17:30 土日祝休み)
FAX: 0120-23-4080